

ナセント®

福祉用具

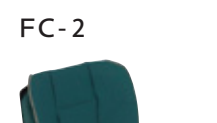
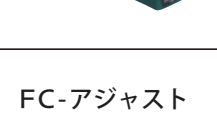
メンテナンスについて

[表示内容について]
 ◎ 最も適している
 ○ 適している
 × 不可

●商品を長くご愛用いただくためには、取扱説明書をご確認ください。

ナ ー セ ン ト ク ャ ッ シ ョ ン シ リ ー ズ

品 名	種 類	洗 浄 方 法				清 拭	消 毒 方 法						取扱い上のご注意
		洗 剤	手 洗 い	洗 濯 機	乾 燥 機		漂 塩 白 素 剤 系	（オスバン液） 逆 性 石 鹼	オ ソ ン	乾 高 性 消 毒 温	熱 湯 洗 浄	ク オ レ ー プ ト	
NEW メディカルパット (70/50/40/20)  スワロー 	本 体			×	×	○ 中性洗剤	×	×					・脱水後、日陰乾燥
	カ バー	中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	押し洗い ◎	弱流	○ ネット使用	○ アルコール 中性洗剤		○ 2%に希釈	○	110℃ まで 60分以内	○		・脱水後、裏がえして 日陰乾燥
NEW ナーセント Ex ロール (200/150/100)  ナーセント Ex ワイド 	本体 / カ バー	中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	◎	弱流	○ ネット使用	○ アルコール 中性洗剤	○ 2%に希釈	○	○	132℃ まで 15分以内	○	132℃ まで 15分以内	・脱水後、日陰乾燥
ナーセントパット A (2P/3P/L50/ミニ) 	本 体			×	×	○ 中性洗剤		×		100℃ まで 30分以内			・脱水後、日陰乾燥
	通 気 カ バー	中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	押し洗い ◎	弱流	○ ネット使用	○ アルコール 中性洗剤	×	○	○	120℃ まで 20分以内	×	×	・脱水後、裏がえして 日陰乾燥
	防 水 カ バー			○ ネット使用	○ ネット使用	○ アルコール 中性洗剤				×			
ナーセントロール 	本 体	中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○	弱流	○ ネット使用	○ アルコール 中性洗剤	○	○	○	75℃ まで	×	×	・脱水後、日陰乾燥
	カ バー			◎ ネット使用	○ ネット使用	○ アルコール 中性洗剤	×			○			
ライトターン 	本 体		×	×	×	◎ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)	×	清拭のみ ○ ※	○	75℃ まで	×	×	
	カ バー												※逆性石鹼(オスバン液)に 漬けないこと
ナーセントアップニー 	本 体		×	×	×	○ 中性洗剤		×					・水洗い不可
	カ バー	中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	◎	弱流	○ ネット使用	◎ アルコール 中性洗剤	×	○	○	75℃ まで	×	×	・脱水後、日陰乾燥

品 名	種 類	洗 浄 方 法				清 拭	消 毒 方 法				高 温 水 洗 浄	取扱い上のご注意
		洗 剤	手 洗 い	洗 濯 機	乾 燥 機		漂 白 素 剤 系	逆 性 石 鹼 (オスバン液)	オ ゾ ン	乾 性 消 毒 温 度		
FC-コキュー君 	本 体		×			○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)	○※			×	×	※逆性石鹼(オスバン液)に漬けない事 ・水洗い不可 ・耐熱70℃以下
	パット	○ 中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	押し洗い	×	×	○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)	○	○				・面ファスナーがパットを傷付けないよう個々に手洗い ・脱水後、日陰乾燥
	カバー		○	弱流 ネット使用	○	○ アルコール 中性洗剤			○	○	○	・脱水後、日陰乾燥推奨
ゲルファースト 	本 体		×	×	×	○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)	○※			×	×	※逆性石鹼(オスバン液)に漬けない事 ・水洗い不可 ・耐熱70℃以下
	標準 カバー 防水 カバー	○ 中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○	弱流 ネット使用	○	○ アルコール 中性洗剤	○	○		○	○	・脱水後、日陰乾燥推奨 ・脱水後、裏がえして日陰乾燥推奨 ・アイロンかけ不可
エルダークッション 	本 体		×	×	×	○ アルコール 中性洗剤	○※			75℃ まで	×	※逆性石鹼(オスバン液)に漬けない事 ・水洗い不可 ・耐熱75℃以下
	防水 カバー	○ 中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○	弱流 ネット使用	○	○ アルコール 中性洗剤	○	○		×	×	・脱水後、裏がえして日陰乾燥推奨 ・アイロンかけ不可
FC-フィット(背) 	本 体			弱流 ネット使用	×	○ アルコール 中性洗剤	×			75℃ まで	×	・脱水後、日陰乾燥 ・アイロンは中温、当て布
	ロング パット	○ 中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○	×		○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)	○	○	○	100℃ まで 30分以内	120℃ まで 20分以内	
	ロング パット カバー			弱流 ネット使用	○	○ アルコール 中性洗剤	×			×	○	・脱水後、日陰乾燥推奨
FC-フィット(腰) 	本 体		×	×	×	○ アルコール 中性洗剤	○※			75℃ まで	×	※逆性石鹼(オスバン液)に漬けない事 ・水洗い不可
	カバー	○ 中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○	弱流 ネット使用	○	○ アルコール 中性洗剤	×	○		×	×	・脱水後、裏がえして日陰乾燥推奨 ・アイロンかけ不可
FC-2 	背 パット		○	×		○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)	○			100℃ まで 30分以内	120℃ まで 20分以内	○
	カバー	○ 中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○	弱流 ネット使用	×	○ アルコール 中性洗剤	×	○	○	75℃ まで	×	・背板を抜いて洗浄 ・脱水後、日陰乾燥
	座 本体			×		○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)	○			100℃ まで 30分以内	120℃ まで 20分以内	○
	クッション パット	○		×		○ アルコール 中性洗剤						×
FC-アジャスト 	背 パット		○	×		○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)	○				○	
	カバー	○ 中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○	弱流 ネット使用	×	○ アルコール 中性洗剤	×				×	・背板を抜いて洗浄 ・脱水後、日陰乾燥
	座 本体		○	×		○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)		○	○	75℃ まで	○	
	太もも パット クッション パット		○	×		○ アルコール 中性洗剤	○				×	・脱水後、日陰乾燥
	カバー			弱流 ネット使用	○	○ アルコール 中性洗剤	×				○	・脱水後、日陰乾燥推奨
エアビーンズ 	本 体		×	×	×	○ アルコール 中性洗剤	○※		×	×	×	※逆性石鹼(オスバン液)に漬けない事 ・水洗い不可 ・耐熱60℃以下
	カバー	○ 中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○	弱流 ネット使用		○ アルコール 中性洗剤	×	○		○	○	・脱水後、日陰乾燥

スカイリフト専用スリングシート

品名	洗浄方法			清拭	消毒方法				高温水洗浄	取扱い上のご注意
	洗剤	手洗い	洗濯機		漂塩白素剤系	（オスバン液） 逆性石鹼	オゾン	乾性消毒装置による高温乾燥		
エアスリング  エアクッション（空気袋） 	中性洗剤	40℃以下 ◎	弱流 ○ ネット使用	◎ アルコール	×	○	○	×	×	• お手入れの前に必ずエアクッションを取り出すこと • 包みしぼりで脱水後、日陰乾燥
		×	×							• エアクッション内部に水分が入らないよう注意すること
サポートスリング 	中性洗剤	40℃以下 ◎	弱流 ○ ネット使用	◎ アルコール	×	○	○	×	×	• 包みしぼりで脱水後、日陰乾燥
スムーズホルダー 	中性洗剤	40℃以下 ◎	弱流 ○ ネット使用	◎ アルコール	×	○	○	×	×	• 脱水はタオル等で抑えて水分を取り除き、日陰乾燥