

新発売!

置き間違いによるリスクを低減。 薄型ゲルクッション—。



葉っぱのゲルが骨突出部を守る

FC-クローバー

介護保険：福祉用具貸与（車いす付属品）

選べる2サイズ
幅38cm・幅40cm

22,000円（税抜）


替えカバー 3,900円（税抜）



裏面防水 防水カバー色：ブラック

どの方向に座っても大丈夫。 4つの葉っぱが骨突出部を守ります。

前後左右の向きがないフラットタイプなので、置き間違いによる誤用を防ぎます。
葉っぱのゲルが坐骨と大転子の圧迫やズレを軽減し、仙骨部は凹型で圧を逃します。

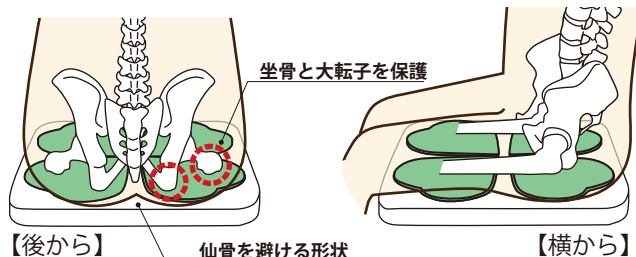

車いすに合わせやすい薄型。 なのに底つきしにくい、驚きの圧分散性能。

ゲルならではのずれ力軽減はもちろん、ゲルを中間層にすることでウレタンが臀部に柔らかくフィット、センターゲルでウレタンの底つきを防止します。

ウレタン


ソフトなウレタンで、臀部に優しくフィットします。

センターゲル

追従性の良いゲルでずれ力を軽減、センターでウレタンの底つきを防止します。

チップウレタン

しっかりとしたウレタンで、座位を安定させます。

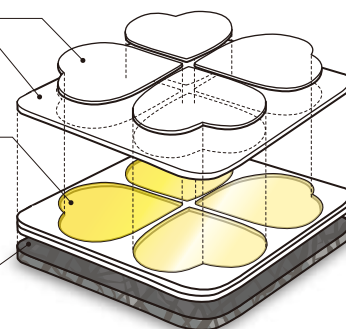


冬場にも嬉しい。 ゲルクッションなのにひんやりしません。

温度変化に影響されにくいゲルを、さらにウレタンでサンドしているので、ゲル特有の冷たさを感じません。

カバーには調整ポケット付き。

カバー底面の内側には、B5サイズの冊子が入る調整ポケットが付いています。車いす座面のたるみを解消して、大腿部でしっかり体重を受けるので、姿勢の安定を図れます。
(ポケット使用時は置く向きに気をつけてください。)

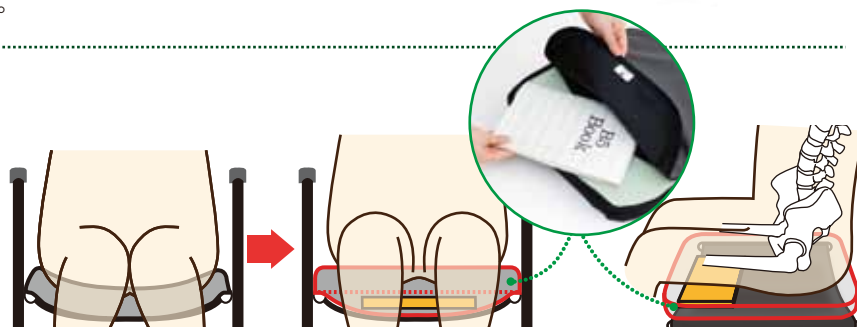

葉っぱのゲルってどんなゲル？

クローバークッションの特殊ゲルは、人の皮膚にやさしい弾力性と追従性を備えた新開発のゲル素材です。



追従性と復元性に優れています。

ウレタンでサンドしても身体の動きに合わせて動くので、お尻にかかるずれ力を軽減します。また、ずれや圧で変形してもゆっくりと元の形に復元します。


薄くても底つきしません。

衝撃吸収性に優れ、薄くても底つきしにくい素材です。さらにゲルとウレタンを組み合わせることで圧分散性の向上を図りました。

温度依存性の低いゲルです。

冬場など室温が低くても冷たくなりにくい素材なので、いつも快適にご使用いただけます。

圧分散比較

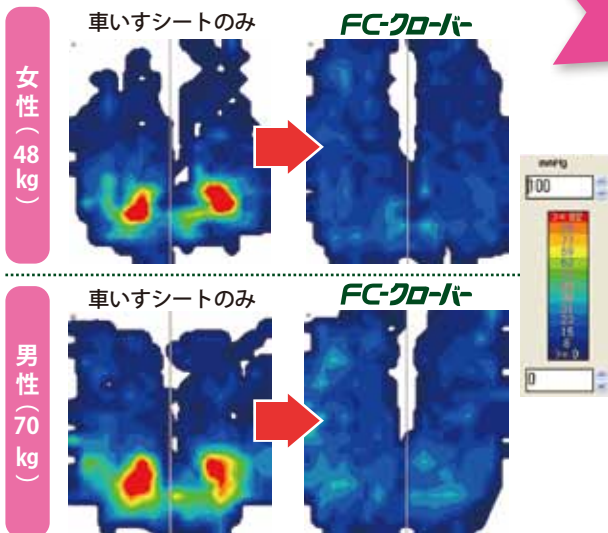


こんな声がよせられています！

- ・カバー洗濯後、中身の入れ間違いがなくなりました
- ・長時間座っても、不思議とお尻が痛くなりません
- ・車いすのアームレストやフットレストに合わせやすい丁度いい厚さですね
- ・体重が重くても、底つき感がないのが驚きです
- ・調整ポケットは、たるみ防止だけでなく前滑りや骨盤後傾の防止などに使え、本当に便利です！

FC-クローバ

品 名		価格(税別)	重 量	TAISコード	JANコード
本 体 + カバー(防水)	38cm	¥ 22,000	800 g	00149-000042	4560232694010
	40cm	¥ 22,000	950 g	00149-000043	4560232694027
替えカバー(防水)	38cm	¥ 3,900	—	—	—
	40cm	¥ 3,900	—	—	—
材 質	(本 体) ウレタン樹脂フィルム、ウレタン複合材、特殊ゲル (カバー) ポリエステル 100%(裏面ウレタンフィルムラミネート加工)、ナイロン 100%(ウレタン樹脂塗布)				

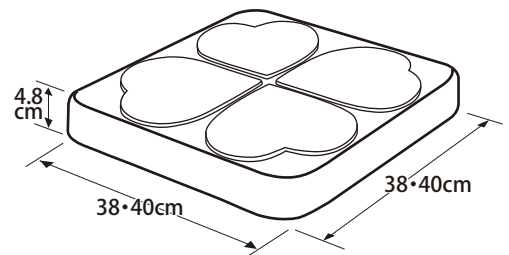

お手入れ

- カバーは、本体から取り外して洗濯ネットに入れ、洗濯機の弱流で中性洗剤を使用して洗って下さい。
- 本体は、水または中性洗剤で清拭してください。

FC-クッションシリーズのご用命は



アイ・ソネックス株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7

TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

<http://www.nasent.net>



・このカタログに掲載の商品について、品質向上のためお断りなく仕様を変更する場合や商品の実際の色が印刷色と若干異なる場合がございます。恐れ入りますが予めご了承ください。

・「QRコード」は商標登録の登録商標です。

2016.05