


FC-コキュー君

取扱説明書


1. ご使用方法

- ① ご使用前に、使用者の体重40kgを目安に、40kgを超える方は黒い色のチェックバルブホルダ(付属品)を選択し、40kg以下の方は白い色のチェックバルブホルダを選択して、クッション本体のエアーバルブに装着してください。

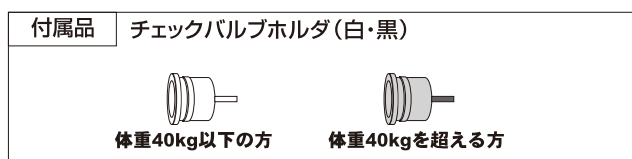


<チェックバルブホルダの装着方法>

バルブ開口部を手前にし、左図のようにエアーバルブへ直角に差込み、「パチッ」と音がするまで押し込んでください。

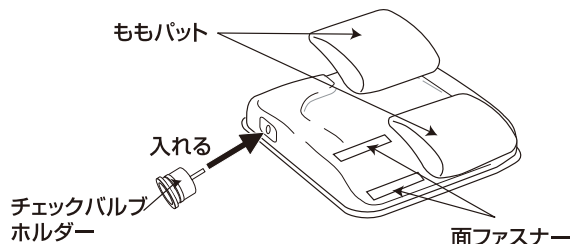


- ② 装着後クッションに使用者「体重40kgを超える人」「体重40kg以下」の表示シール(付属品)を貼り、ご使用ください。(シール離型紙をはがし、粘着面をクッションに貼合せて下さい)

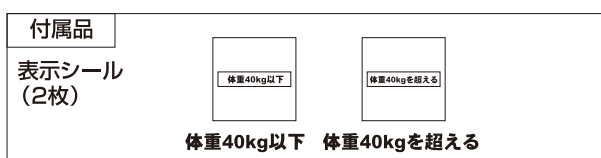


- ③ ももパットは面ファスナーで着脱できます。
ももパットを外すと前座が3cmまで低くなります。

- ④ クッションカバーはファスナー部分が前にくるようにしてクッションを入れて下さい。

- ⑤ カバーについている「バック」の表示が後方にくるようにして座ってください。

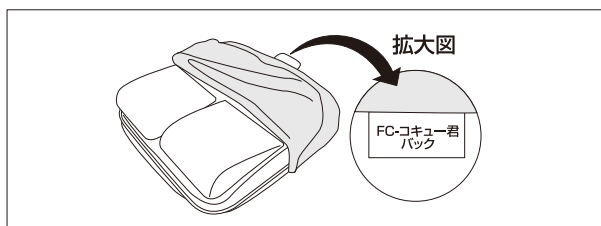


- ⑥ 座ってから約10~30秒で体に合った座面が形づけられますので、そのままご使用下さい。使用後は自然に元の状態に戻ります。

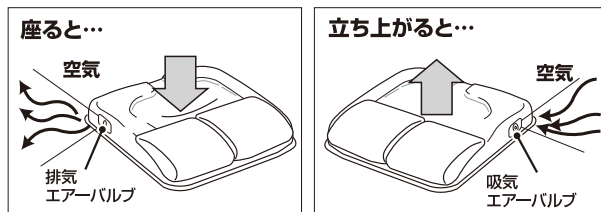

2. 注意事項

- ① 針、釘等の突起物のある所でのご使用は避けて下さい。万一クッションが破損した場合は、補修用粘着テープ(付属品)で補修して下さい。
- ② クッションが破損した場合の修理方法は、穴明き箇所の汚れを中性洗剤で良く拭き取ってから、補修用粘着テープで修理して下さい。補修用粘着テープの離型紙をはがし、粘着面を穴明き箇所に貼り合わせ、シワのないように圧着してください。
- ③ クッションの中に水などの液体、又は空気以外の気体を入れないで下さい。
- ④ クッションの上に急激な衝撃をかけないで下さい。クッションが破損する場合があります。
- ⑤ ストーブ等の火の近くに置かないで下さい。
- ⑥ バルブの上にお尻がかからないように座ってください。

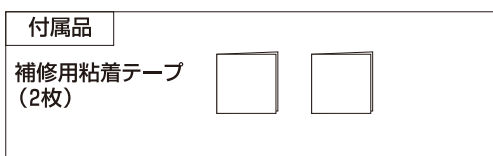


3、お手入れ方法

- ①クッションカバーが汚れた場合は、クッションを取り外してカバーを洗濯ネットに入れて、洗濯機の弱流で中性洗剤を使用して洗ってください。その後、軽く脱水したあと、日陰で自然乾燥して下さい。
- ②クッションが汚れた場合には、ももパットをはずして、水又は中性洗剤で拭き取るようにして下さい。その際、エアーバルブの口から水又は中性洗剤が入らないようにして下さい。
- ③ももパットは一つずつ中性洗剤で軽く押し洗いして下さい。一緒に洗うと面ファスナーが他のパットを傷つける恐れがあります。タオルなどで水分を取った後、日陰で自然乾燥して下さい。

<ももパットのお手入れ>


①水で薄めた中性洗剤でやさしく押し洗いした後、よくすすいでください。その時、丸めたり折り曲げたりしないようにして下さい。破損の原因になります。

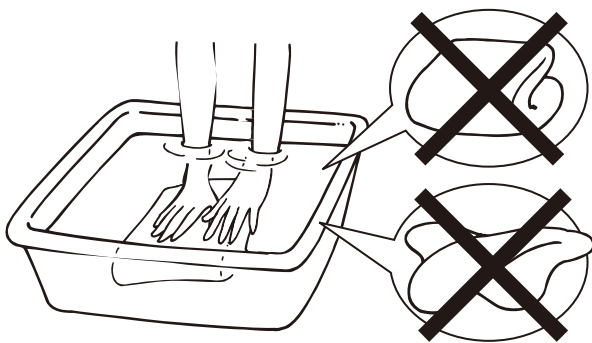

②タオルで水分を取る。



③日陰で自然乾燥して下さい。

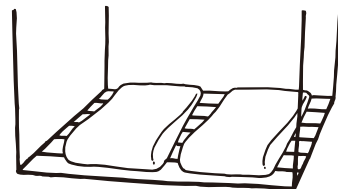

4、仕様

名称	素材
クッション本体	ウレタンフォーム
クッション皮膜	ウレタン樹脂フィルム
ももパット	ウレタンフォーム
ももパット皮膜	表面ナイロン、裏面ウレタン樹脂フィルム
バルブ	ポリエステル樹脂、シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂
カバー	表生地 ポリエステル100%
	裏生地 ナイロン(ウレタン樹脂塗布)
寸法	W40cm×D42 cm×H8cm
重量	860g

お問合せ先

発売元：アイ・ソネックス株式会社
本社 〒702-8004岡山市中区江並100-7
TEL086-200-1550
FAX086-200-1553
ホームページ：<http://www.nasent.net>

製造元：寿化成株式会社
本社 〒444-3524
岡崎市竜泉寺町塘ヶ入41-64

● 品質向上のため、お断りなく仕様変更することがありますのでご了承ください。