

ビーズ入り
エアクッション!

空気量の調整で形状維持が簡単!!

エアビーナス 取扱説明書


このたびは、エアビーナスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」には、エアビーナスを正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。

- 正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずお読みください。
- 必要なときに読めるように大切に保存してください。
- お買い上げの製品は、改良のため一部においてこの取扱説明書と異なる場合があります。


⚠ 注 意

1. お手入れの際には、シンナー、ベンジン等の溶剤は使用しないでください。
2. 60℃以上になる高温下でのご使用や保管はさけてください。
3. タバコや火気に近づけないでください。
4. ガラス片、金属片、木片など尖った物を接触させないでください。
5. 人を乗せたまま引っ張ったり持ち上げたりすると、破損の原因になります。
6. 空気注入後は栓をしっかりと差し込み、本体内部に強く押し込んでご使用ください。
7. 患者さんの身体に無理のかかる体位でのご使用はお止めください。

各 部 の 名 称

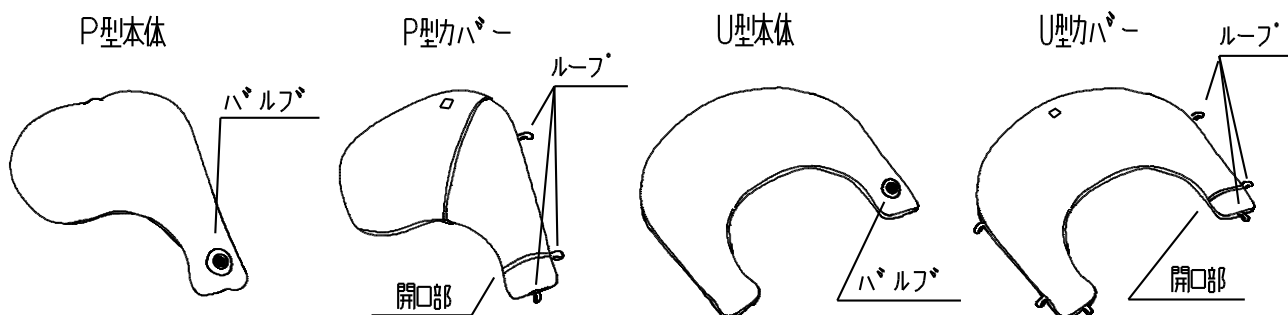


仕 様

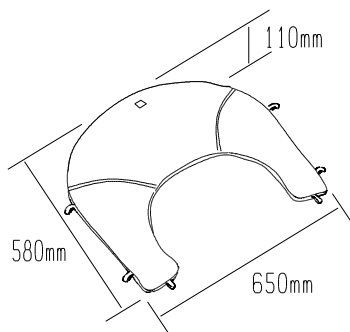

《エアビーナスU型》

サイズ : W650 mm × D580 mm × H110 mm
重 量 : 本体 640 g カバー 130 g
エアバッグ : 塩化ビニール
ビーズ : ポリエチレンビーズ
カバー : 綿 75% ポリエステル 25%

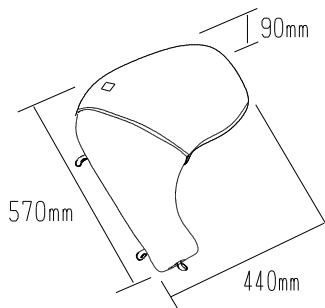





《エアビーナスP型》

サイズ : W440 mm × D570 mm × H90 mm
重 量 : 本体 415 g カバー 100 g
エアバッグ : 塩化ビニール
ビーズ : ポリエチレンビーズ
カバー : 綿 75% ポリエステル 25%

ご使用方法




《 空気の入れ方 》

1. カバーの開閉口を開き、バルブの栓をつまんでバルブを引き出し、栓を開けてください。
2. バルブの根元をつまんで、本体を揺すって中のビーズを大きく動かすと空気が自然に入ります。
3. 十分に空気が入りましたら、栓をしっかりと閉めて、バルブを本体内部へ押し込んでください。

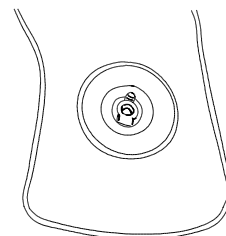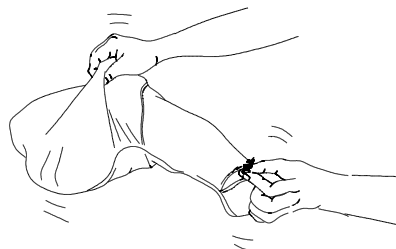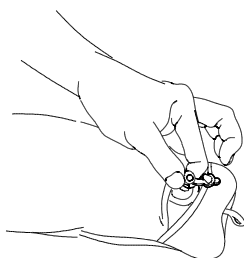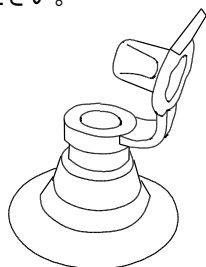



《 空気の抜き方 》

1. バルブの栓を開け、バルブの根元をつまんだまま、本体から空気を押し出すようしっかり押さえてください。
2. 空気が抜けたら、本体を押さえたままバルブの栓をしっかりと差し込んでください。
3. バルブを本体内部へ押し込んでからご使用ください。

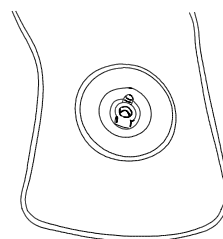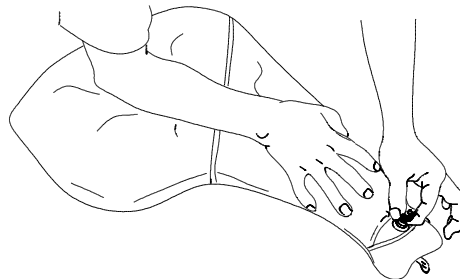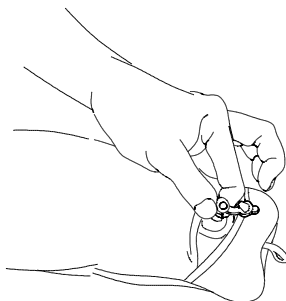

《 ループの使い方 》

エアビーナスのカバーのループに、ひも等を通して、車いすの肘掛けパイプや背もたれパイプ等に結び付けると、エアビーナスの落下を防止できます。また、立ち上がったとき、エアビーナスを座席外に跳ね上げられますので、置く場所に困りません。

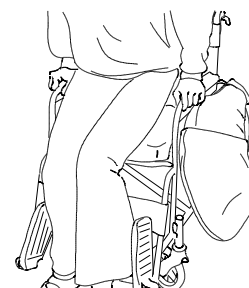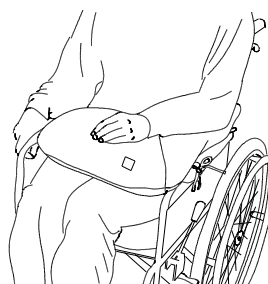

お手入れの方法

《 本体のお手入れ 》

1. 本体表面の汚れはタオルや布を使い、水で薄めた中性洗剤で汚れを拭き取ってください。
2. 消毒をされる場合は、アルコールで清拭してください。

《 カバーのお手入れ 》

1. 家庭用洗濯機で洗濯する時はネットに入れてください。
2. 塩素系漂白剤は使用しないでください。
3. 乾燥機は使用しないでください。
4. アイロンをかける時は低温にしてかけてください。
5. 干すときは日陰干しにしてください。

●製品の改善・改良のため仕様を予告なく変更することがありますので、御了承ください。

<販売店>

<製造元>



アイ・ソネックス株式会社

ホームページ <http://www.nasent.net/>

本社／〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7
TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553