

カンタン操作 + 安全・安心設計



① カンタン充電
専用アダプターを本体とコンセントに差し込むだけ。

② 緊急下降ボタン付


とっさの時にも大丈夫。
(停止センサー作動時もこのボタンは動作します)



③ スwitchの切り忘れも大丈夫、勝手に電源オフ
操作を止めてから20分後に自動的に電源が切れるので、バッテリーの消耗を防ぎます。



④ 停止センサー付
胸パッドの下端部が体に触れると自動的に下降がストップ。挟みこみを防止します。

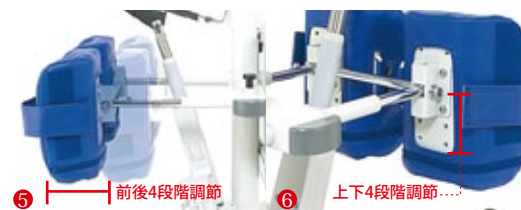


⑤ 身体に合わせて調節可能な膝パッド
⑤ 体格に合わせてワンタッチで、前後に4段階調節ができます。
⑥ 高さもネジ止めで4段階調節ができます。



¥480,000 (非課税)

スカイリフト脚部寸法

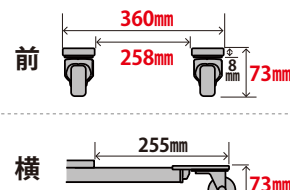


●スカイリフトを操作しやすい床面の工夫

・床が畳や絨毯で走行しづらい場合は、ベニヤ板等を敷くか、床をフローリング改修して頂くことをお勧めします。

・段差のある場所は段差解消スロープを設置するか、床面のバリアフリー改修をお勧めします。

使用環境や福祉用具との適合性

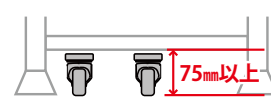


【電動ベッド】ボトムフレーム下の高さ75mm以上

※フレームのたわみ等に留意し、必ず利用者がベッドに座った状態で計測してください。



【車いす】

前輪キャスターの内幅362mm以上

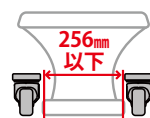

【洋式便器】洋式便器の幅256mm以下

※便器の土台部分の形状によってはキャスター部分にも注意が必要です。


スカイリフトSL-2009U仕様

JANコード：4560232694119
TAISコード：00149-000051


サイズ：幅 50.5×高さ 135.7×奥行 96cm
重量：37kg (耐荷重 100kg)
材質：〔本体〕スチール製

※バッテリー内蔵型（家庭用 AC100V で充電）
※モデルが装着している各種スリングシートは別売です。

[TOP]

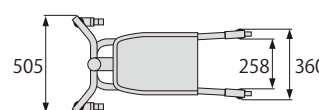

[SIDE]

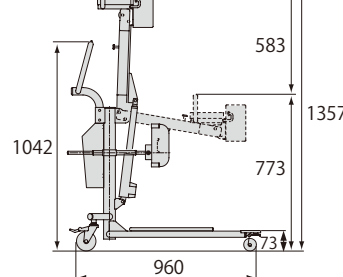

スカイリフトのご用命は



アイ・ソネックス株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7
TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553
<http://www.nasent.net> ナーセント 検索



・このカタログに掲載の商品について、品質向上のためお断りなく仕様を変更する場合や商品の実際の色が印刷色と若干異なる場合がございます恐れ入りますが予めご了承ください。
・「QRコード」は関連ウェブページの登録商標です。 2016.03

介護保険：福祉用具貸与（移動用リフト）

座位から立位に、そして座位に。
簡単な操作で移乗をサポート



★適応条件

【身長／体重】

145～175cm / 100kg 未満

【身体機能】

- ・ベッドに自力または一部介助で端座位が可能な方
- ・座位から立位までの下肢関節の可動域がある程度保たれている方
- ・片まひ、両下肢まひ、四肢まひがあっても、下肢に体重をかけることが可能な方



※スカイリフトは、(財)テクノエイド協会の助成を受けて開発されました。



ベッド⇄車いすの移乗に

負担なく毎日の移乗介助ができます



トイレでの排泄ケアを可能に

洋式便器への移乗や衣服着脱が可能に



入浴介助の負担軽減に

シャワーチェアへの移乗も楽に



スタンディングマシーンとして

立つことでリハビリ効果が期待できます



スカイリフトの導入ポイント

筋萎縮性側索硬化症(ALS)

50歳代 / 女性 要介護4

「抱えると肩が脱臼するのでは…と不安でした」

家内を抱え上げて車いすに座らせるとき、脇を抱えると肩関節が脱臼する恐れがあると医師から言われ、安全に移乗できる方法を探していました。(ご主人の声)

「これでお互いに安心して移乗することができます」

脱臼の心配なく安心して介助でき、ポータブルトイレも使えるようになり助かっています。妻も頑張ろうという意欲がでてきたように思います。



脳梗塞による両側まひ


70歳代 / 男性 要介護4

「大柄な主人のトイレ介助は本当に大変でした」

体重85kgの主人が「どうしてもトイレに行きたい」というので、朝晩息子がいる時間に二人で抱え上げて便器に座らせていましたが、本当に大変でした。(奥様の声)

「立った姿勢でおむつの交換ができるのも便利ですね」

一人で便器に座らせることや立っておむつ交換もできるので、とても助かっています。身体が楽になると主人の多少の我儘も受け入れられるようになりました。

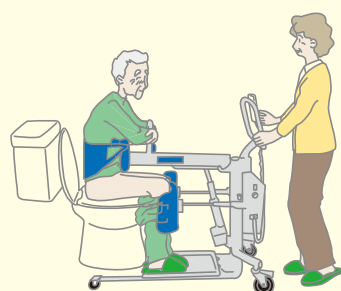

パーキンソン病

60歳代 / 男性 要介護3

「小柄なので車いすへの乗せ換えが困難でした」

私が小柄なので、体重65kgの主人をベッドから車いすに乗せ換えることができなくなり、訪問介護のヘルパーさんも音を上げていました。(奥様の声)

「もうリフトのない生活には戻れません」

ヘルパーさんも私もリフトなしで生活できないくらい利用しています。床もフローリングに貼り替えたのでより使いやすくなりました。レンタル制度を利用できるので経済的にも助かっています。



脊髄損傷による下半身まひ

30歳代 / 男性 要介護3

「高齢なので身体的には限界を感じていました」

毎日、90kgの息子を夫婦二人でベッドから車いすに乗せ換えていましたが、二人とも70歳を越えて身体的な限界を感じていました。(ご両親の声)

「移乗だけでなく入浴介助にも使っています」

車いすだけでなくシャワーキャリーにも乗せ換えるので毎日の介助が苦痛でなくなりました。自分達の生きている間にリフトを使って少しでも自立できるようになって欲しいと思っています。



頚椎損傷による四肢まひ


60歳代 / 女性 要介護4

「退院後のリハビリについて悩んでいました」

退院を控え、家に戻ってからの介護やリハビリをどうするか悩んでいたところ、担当の理学療法士さんからスカイリフトを紹介いただきました。(ご主人の声)

「リハビリのため立位訓練にも使っています」

身体を動かさないと関節が固くなると理学療法士さんに言われ心配でしたが、車いすに乗せ換えるついでに少し長く立ってリハビリしているので、今のところ変化なく生活できています。

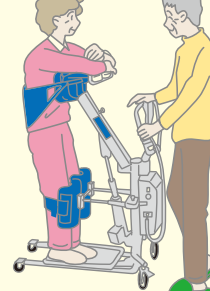

介助力の軽減

「トイレ誘導は、二人介助でもやっとの状態でした」

洋式便器への移乗介助は、パンツの上げ下げや抱え動作のため二人介助でもやっとの状態でした。



「一人の介助者でも洋式便器への移乗やおむつ交換ができるようになりました」




腰痛対策

「入浴時の更衣介助は、腰が痛くなり本当に大変でした」

車いすからシャワーキャリーに移乗して更衣する時は、抱える人と更衣の介助をする人双方に負担がかかっていました。


「腰への負担が軽くなって、介護に余裕がもてるようになりました」

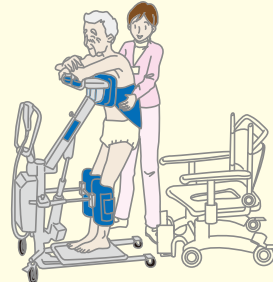


事故防止

「新人職員が多くなり、移乗時の事故が増えて困ってました」

移乗時に転倒や打ち身などの事故が発生しご利用者様から「痛い、怖い」といった声がありました。

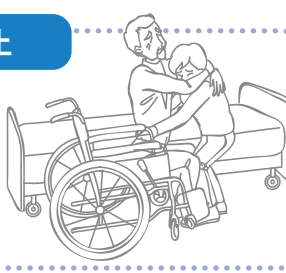

「新人の職員でも安全に移乗介助が行えるようになりました」

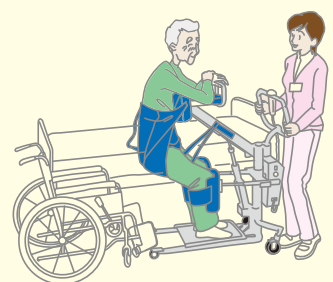

【介護保険制度】

- ◆リフト本体◆ 介護保険制度の「移動用リフト」として、福祉用具貸与(レンタル)の適用対象品となります。
- ◆リフト吊り具◆ 介護保険の購入対象品となります。
- ◆適用対象者◆ 要介護度2～4の方。状態像としては、日常的に立ち上がりが困難な方や移乗に一部介助又は全介助を必要とする方。
- ◆お問合わせ◆ 担当ケアマネージャーや福祉専門相談員にご相談の上、利用目的や症状にあわせて正しくお選びください。

留意事項

- ・重度の関節拘縮や円背のある方、全く力の入らない弛緩性まひの方は、適応しない場合があります。
- ・起立性低血圧や重度の骨粗鬆症のある方、変形性関節症のある方は主治医や看護師にご相談の上、ご使用ください。
- ・ご使用に際して不安のある時は、事前に立位をとることに支障はないか、主治医や担当のPT・OTにご確認ください。

スカイリフト専用スリングシート

介護保険：特定福祉用具購入(移動用リフトのつり具の部分)

エアスリング AS-201

手早く装着できて、ズボンやパンツを着脱できるので排泄ケアに最適です



Mサイズ・Lサイズ
各¥35,000(税別)

JANコード：(Mサイズ)4560232694126
(Lサイズ)4560232694164


TAISコード：00149-000002

▲エアクッション内蔵



エアスリング専用胸パット オプション品

立ち上がり時の滑りを防止し、体幹を安定させます

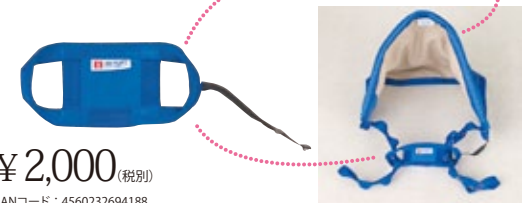

¥2,000(税別)

JANコード：4560232694188

サポートスリング SS-202

座った姿勢で使えるので初めての方でも安心です



Mサイズ・Lサイズ
各¥32,000(税別)

JANコード：(Mサイズ)4560232694133
(Lサイズ)4560232694171

TAISコード：00149-000003



トイレットスリング TS-204

スリングを装着したままでズボンやパンツを着脱ができます



¥32,000(税別)

JANコード：4560232694157



スムーズホルダー SH-203

しっかり腰をサポートして、起立姿勢がとれるのでリハビリ訓練におススメです

¥18,000(税別)

JANコード：4560232694140
TAISコード：00149-000025

必ずエアスリングと併用してください

