
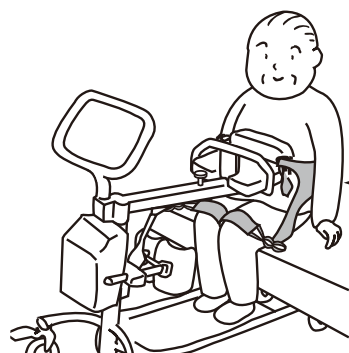


スカイリフト用トイレスリングの使用手順


スカイリフト用トイレスリングは、スカイリフトで洋式便器やポータブルトイレへ移乗する際に、スリングを装着した状態でもズボンや下着の着脱を行うことができる排泄ケア専用のスリングです。

この使用手順を守って正しくご使用ください。


なお、基本的な操作方法についてはスカイリフト SL-2000 又は SL-2009 の取扱説明書を必ずお読みください。

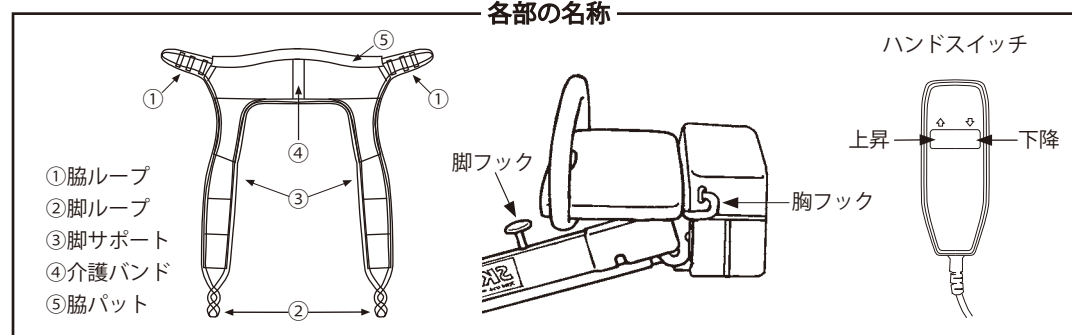


①脇ループを胸フックにかけ、脚サポートを太ももの内側から引き出してください。
また、ズボンのウエスト部分がスリングと重ならないよう、ズボンを少し下げておいてください。

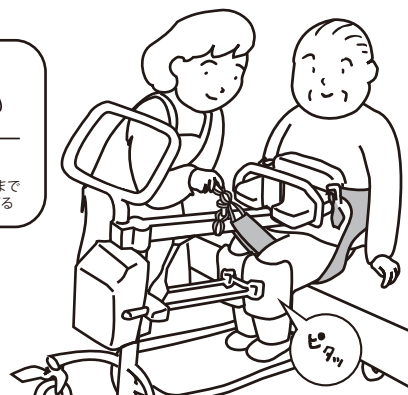

②引き出した脚サポートの脚ループを、脚フックにしっかりかけ、膝パットが両膝にピッタリ合う位置まで調節してください。

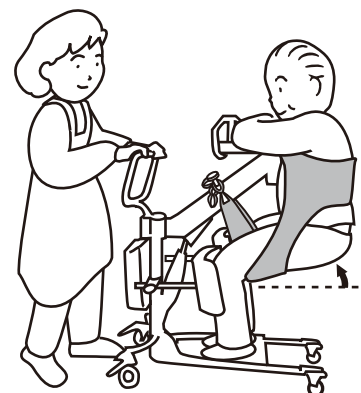

③ハンドスイッチの↑印を押しながら、介護を受ける方の臀部が浮き上がるまで、スカイリフトを上昇させた後、移動を開始してください。

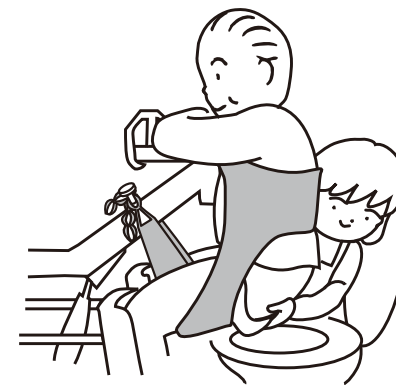


④洋式便座の近くまで移動してから、ズボンや下着を下してください。両側の坐骨が見えるところまでズボンや下着を下げると、後の介助が楽に行えます。




⑤ハンドスイッチの↓印を押しながら下降させ、便座に着座させた後、脚サポートを外してください。膝パットを前方に移動させてから、両膝の下までズボンを下げてください。



⑥排泄が終了したら、ズボンや下着を太ももまで引き上げた後、ズボンに皺ができないように気をつけてズボンの上から脚サポートを内側に引き出してから、脚ループを脚フックにかけてください。

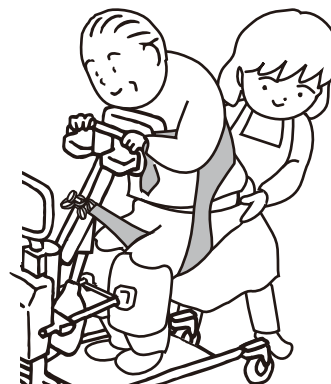

⑦膝パットを両膝に合う位置に戻し、ハンドスイッチの↑印を押しながら、腰が浮き上がるまで上昇させた後、ズボンや下着を腰まで引き上げてください。

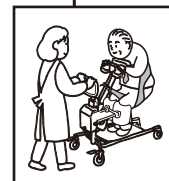

⑧ズボンや下着を整えてからスカイリフトを移動してください。ハンドスイッチの↓印を押しながら、ベッドや車いすに移乗した後、トイレスリングを外してください。