

# ナーセント® 福祉用具 メンテナンスについて

[表示内容について] ◎ 最も適している ○ 適している × 不可

## ナーセントクッションシリーズ

品名	種類	洗浄方法			清拭	消毒方法				取扱い上のご注意
		洗剤	手洗い	洗濯機		漂白剤系	逆性石鹼 (オスバン液)	オゾン	乾性消毒 装置による 高温乾燥	
ナーセントパット A (2P/3P/L50/ミニ)  	本体			×	◎ アルコール 中性洗剤					100℃ まで 30分以内 120℃ まで 20分以内  ・脱水後、日陰乾燥
	通気カバー	○ 中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	◎			×				
	防水カバー			弱流 ○ ネット使用					×	
ナーセントロール  	本体					○			○ 75℃ まで	・脱水後、日陰乾燥
	カバー	○ 中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○	弱流 ◎ ネット使用		×			○	
ナーセントアップニー  	本体		×	×	◎ アルコール 中性洗剤				○ 75℃ まで	・水洗い不可
	カバー	○ 中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	◎	弱流 ○ ネット使用		×			○	・脱水後、日陰乾燥
ライトターン  	本体			×	◎ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)		○ 清拭のみ ※1		○ 75℃ まで	※1 逆性石鹼(オスバン液)に漬けないこと
	カバー		×	×		×			○	
エアビーナス  	本体		×	×	◎ アルコール 中性洗剤		○ 清拭のみ ※2		○ 75℃ まで	※2 逆性石鹼(オスバン液)に漬けないこと ・耐熱60℃以下
	カバー	○ 中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	◎	弱流 ○ ネット使用		×			○	・脱水後、日陰乾燥

ナーセント車いすクッションシリーズ

品名	種類	洗浄方法			清拭	消毒方法				高温水洗浄	取扱い上のご注意	
		洗剤	手洗い	洗濯機		漂白剤系	逆性石鹼 (オスバン液)	オゾン	乾性消毒装置による高温乾燥			
 FC-コキュー君	本体		×		○					×	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐熱70℃以下</li> <li>水洗い不可</li> </ul>	
	パット		押し洗い ○	×	○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)	×	○	○		×	<ul style="list-style-type: none"> <li>面ファスナーがパットを傷付けられないよう個々に手洗い</li> <li>脱水後、日陰乾燥</li> </ul>	
	カバー	中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○	弱流 ○ ネット使用					○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>脱水後、日陰乾燥</li> </ul>	
 ゲルファースト	本体		×	×	○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)		清拭のみ ○ ※3			×	<ul style="list-style-type: none"> <li>※3 逆性石鹼(オスバン液)に濡れない事</li> <li>水洗い不可</li> <li>耐熱70℃以下</li> </ul>	
	標準カバー	中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○	弱流 ○ ネット使用		×	○		○	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>脱水後、日陰乾燥</li> </ul>	
	防水カバー								×	×	<ul style="list-style-type: none"> <li>脱水後、日陰乾燥</li> <li>アイロンかけ不可</li> </ul>	
 エルダークッション	本体		×	×	○ アルコール 中性洗剤		清拭のみ ○ ※4		75℃ まで	×	<ul style="list-style-type: none"> <li>※4 逆性石鹼(オスバン液)に濡れない事</li> <li>水洗い不可</li> <li>耐熱75℃以下</li> </ul>	
	防水カバー	中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○	弱流 ○ ネット使用		×	○		×	×	<ul style="list-style-type: none"> <li>脱水後、日陰乾燥</li> <li>水中へのつけ置き、タンブラー乾燥、アイロンすべて不可</li> </ul>	
 FC-フィット(背)	本体			弱流 ○ ネット使用		×			75℃ まで	×	<ul style="list-style-type: none"> <li>脱水後、日陰乾燥</li> <li>※アイロンは中温、当て布</li> </ul>	
	ロングパット	中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○		○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)	○	○	○	100℃ まで 30分以内	120℃ まで 20分以内	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>脱水後、日陰乾燥</li> </ul>
	ロングパットカバー			弱流 ○ ネット使用		×				○		
 FC-2	背				○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)	○			100℃ まで 30分以内	120℃ まで 20分以内	○	
	背ソフトクッション	中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○	弱流 ○ ネット使用		×		○	75℃ まで	×	<ul style="list-style-type: none"> <li>背板を抜いて洗浄</li> <li>脱水後、日陰乾燥</li> </ul>	
	座				○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)	○		○	100℃ まで 30分以内	120℃ まで 20分以内	○	
	座			弱流 ○ ネット使用		×				○	<ul style="list-style-type: none"> <li>脱水後、日陰乾燥</li> </ul>	
 FC-アジャスト	背				○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)	○				○		
	パット		○	×						○		
	カバー		○	弱流 ○ ネット使用		×				×	<ul style="list-style-type: none"> <li>背板を抜いて洗浄</li> <li>脱水後、日陰乾燥</li> </ul>	
	座	中性洗剤 弱アルカリ性洗剤	○		○ アルコール 中性洗剤 逆性石鹼(オスバン)	○	○	○	75℃ まで	○		
	大腿パット			×						×		
	クッションパット		○				×			×	<ul style="list-style-type: none"> <li>脱水後、日陰乾燥</li> <li>乾燥機不可</li> </ul>	
	座			弱流 ○ ネット使用						○	<ul style="list-style-type: none"> <li>脱水後、日陰乾燥</li> </ul>	