

新発売!

ウサコシリーズ USAKO 摂食嚥下をサポートする。



介護保険：福祉用具貸与(車いす付属品)

PAT.P 意匠第 1521629 号

13,000 円(税抜)



頭や首を適切に保持できない方のために。
頭頸部をしっかりサポートする摂食嚥下用マクラ。

頭頸部を適切に保持することで、摂食嚥下や呼吸を楽しみ、誤嚥防止の姿勢を提供します。
背もたれ延長型のリクライニング式車いすに固定でき、別売の角度ベースなどで頸部角度の調整ができます。取り外してベッドでも使用できます。



体位変換用ハンドル付!

介護保険：福祉用具貸与(体位変換器)




Mサイズ 9,800 円(税抜)

Lサイズ 14,200 円(税抜)

上肢サポートクッション。
肩と腕をしっかり支えます。

長いアームで肩や腕の荷重を支えて、首や肩の緊張を緩和、嚥下を楽しめます。また、体幹を左右からホールドするので、安全で快適な食事姿勢を提供します。

肩までしっかり届く、アームサポート

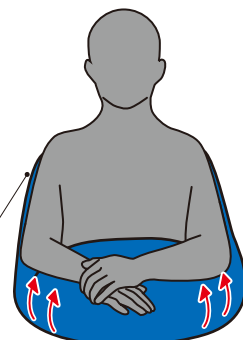

こんな声がよせられています!

- ・飲み込みやすくなり、食べこぼしが少なくなった
- ・口の動きが良くなり、嚥下がスムーズになった
- ・頭部が安定し、食事介助が楽になった
- ・頭部や頭部の緊張が緩和し、呼吸が深くなった
- ・頭部の床ずれが治った

ふんわり素材の吸汗タイプも!
ナセント®Ex ユー



ナセント Ex ユー (M サイズ)

¥9,200(税別)

JAN コード: 4560232691385

TAIS コード: 00149-000038

ナセント Ex ユー (L サイズ)

¥12,800(税別)

JAN コード: 4560232691378

TAIS コード: 00149-000039

〈素材〉カバー：ポリエステル 70%、綿 30%
※クビマクラに吸汗タイプはございません。

USAKOシリーズのお手入れについて


- 洗濯機・乾燥機はご使用になれません。汚れたら、水または中性洗剤、希釈した塩素系漂白剤で清拭してください。
- 塩素系漂白剤をご使用の場合は 2% 以下に希釈してください。つけ置きはしないでください。

<http://www.nasent.net> ナーセント 検索



アイ・ソネックス株式会社

クビマクラの設置目安

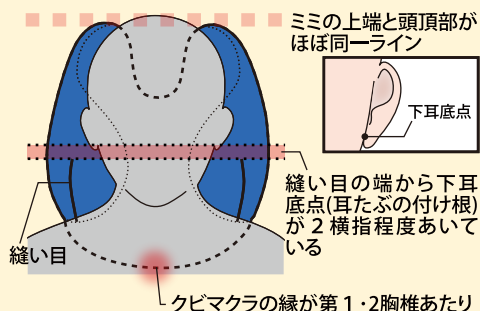

クビマクラの合わせ方と使用方法

車いすで

1

車いすのヘッドレストを外し、クビマクラと背シートの面ファスナーを合わせます。


2

頸部前屈位にする際の角度調整は、オプションの角度ベースや、折りたたんだタオル等で行います。




USA KO クビマクラ

クビマクラ

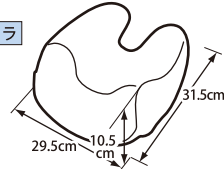

角度ベース

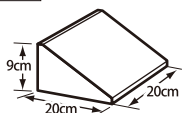


品名	価格(税別)	重量	TAISコード	JANコード
USA KOクビマクラ	¥13,000	440 g	00149-000044	4560232691736
USA KO角度ベース	¥1,800	72 g	—	4560232691743


材質 USA KOクビマクラ: 〈本体〉ウレタン複合材
〈カバー〉ポリエステル 100% (ウレタンフィルムラミネート加工)
USA KO角度ベース: ポリエチレン発泡体

USA KO ユークッション

Mサイズ

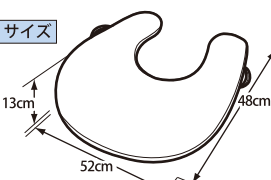

Lサイズ

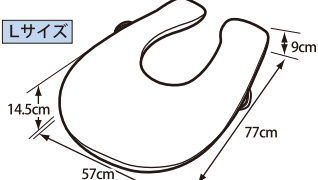

品名	価格(税別)	重量	TAISコード	JANコード
USA KO ユークッション	M ¥9,800	680 g	00149-000040	4560232691811
	L ¥14,200	1240 g	00149-000041	4560232691828

材質 〈中材〉ポリエステル繊維チップ
〈カバー〉ポリエステル 100% (ウレタンフィルムラミネート加工)

USA KOシリーズのご用命は



アイ・ソネックス株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7

TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

http://www.nasent.net

ナース 検索


・このカタログに掲載の商品について、品質向上のためお断りなく仕様を変更する場合や商品の実際の色が印刷色と若干異なる場合がございます。恐れ入りますが予めご了承ください。
・「QRコード」はQRコードの登録商標です。 2016.09