

日常点検表【スカイリフト】

定期的に点検を実施してください。

	チェック項目	☑	
付属品	付属品が全て揃っている	<input type="checkbox"/>	
	・電源コード	<input type="checkbox"/>	
	・六角棒スパナ	<input type="checkbox"/>	
	・部品袋	<input type="checkbox"/>	
	・取扱説明書	<input type="checkbox"/>	
	・保証書	<input type="checkbox"/>	
機構	操作ハンドル：しっかりと固定できている	<input type="checkbox"/>	
	膝パット調整レバー：スムーズに動作し確実に固定できる	<input type="checkbox"/>	
	前輪キャスター：スムーズに動作し確実に固定できる	<input type="checkbox"/>	
	脚部開閉ペダル：ペダルを踏み込むとスムーズに脚部が開閉する	<input type="checkbox"/>	
表示パネル	電源投入時に数秒間(約3秒間)全点灯する	<input type="checkbox"/>	
	充電時、「充電中」が点滅する	<input type="checkbox"/>	
バッテリー	フル充電ができている	<input type="checkbox"/>	
	こまめに充電している	<input type="checkbox"/>	
	長期保管時は3か月に一度充電している	<input type="checkbox"/>	
昇降動作	ハンドスイッチの「あがる」で上昇する	<input type="checkbox"/>	
	ハンドスイッチの「さがる」で下降する	<input type="checkbox"/>	
	無負荷時：上昇時間 23 秒 ± 3 秒	<input type="checkbox"/>	
	無負荷時：下降時間 23 秒 ± 3 秒	<input type="checkbox"/>	
スリングシート	擦り切れやほつれがない	<input type="checkbox"/>	
	エアスリングの場合	エアクッションがパンクしていない	<input type="checkbox"/>
		エアクッションは適切な空気量(目安 50%)	<input type="checkbox"/>
安全装置	挟み込み防止装置	ハンドスイッチを操作して下降時、胸パット下端に触れると停止する	<input type="checkbox"/>
	緊急下降ボタン	押している間下降し離すと停止する	<input type="checkbox"/>
		挟み込み防止装置が作動していても下降する	<input type="checkbox"/>