

新発想の体位変換器！！

ライトターン 標準タイプ 取扱説明書


このたびは、ライトターンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」には、ライトターンを正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。

- 正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずお読みください。
- 必要なときに読めるように大切に保存しておいてください。
- お買い上げの製品は、改良のため一部においてこの取扱説明書と異なる場合があります。

使用上の注意

- 体位変換、良肢位保持以外の用途にはご使用にならないでください。
- 患者さんの体に無理のかかる体位でのご使用はお止めください。
- 使用時には必ず表カバーをつけてご使用ください
- ファスナーをあけたまま使用しないでください。
- 火のそばに近づけないで下さい。
- 体位変換時は必ず肩や腰を持って行い、ベルトのみを強く引っ張りすぎないで下さい。


各部の名称

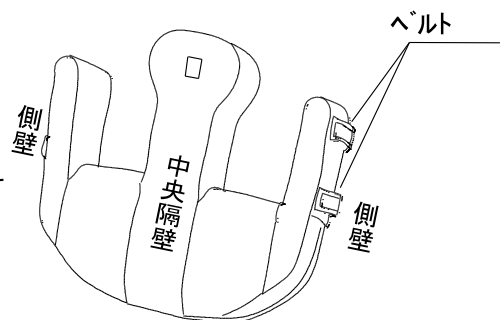

お手入れの方法

- 表カバーは合成皮革ですので、洗濯しないでください。
- 表カバーが汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤で拭き取ってください。
- 消毒をされる場合は、アルコールで清拭してください。
- 本体のウレタンフォームは水洗いしないでください。

ご使用方法

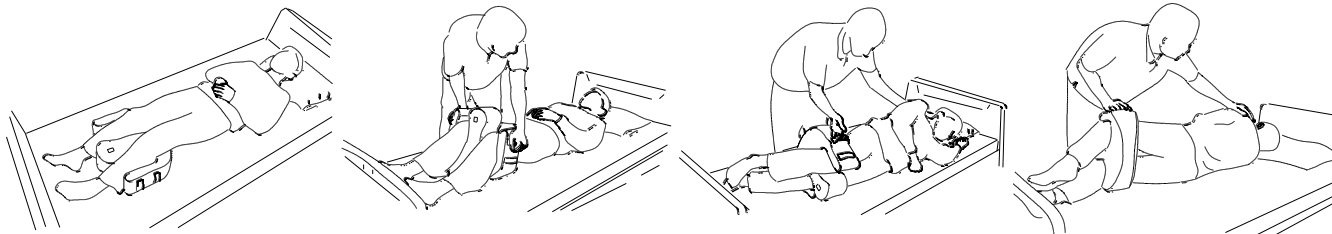


①ライトターの中央隔壁を足先へむけて倒し、両下肢を凹部に乗せて下さい。

②ライトターを体幹方向に回転させて起し、両膝を両側の凹部に入れてください。

③ライトターを回転させ、肩や腰も少し押しながら寝返りを行います。

④股間を開いた状態を維持できるので、おむつ交換や摘便が容易に行えます。

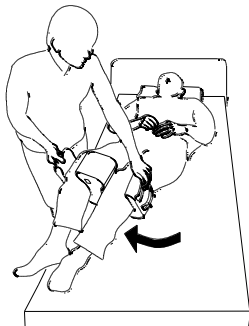

ベッドの幅が狭い場合は、寝返りする反対方向に膝や腰を引いてから行くと、転落の不安なく寝返りできます。

仕様

サイズ：幅 430 mm × 高さ 390 mm × 奥行 130 mm
 クッション材：高密度高硬度ウレタン
 高密度高弾性ウレタン
 高密度低弾性ウレタン
 芯 材：ポリプロピレン樹脂
 重 量：950 g (カバー含む)
 表 材：ポリウレタンソフトレザー

●製品の改善・改良のため仕様を予告なく変更することがありますので、御了承ください。

<販売店>

<製造元>

アイ・ソネックス株式会社

ホームページ <http://www.nasent.net/>

本 社 / 〒702-8004 岡山県岡山市中区江並 100-7

TEL : 086-200-1550 FAX : 086-200-1553