

特定福祉用具・特定介護予防福祉用具

介護の経験が活かされた ナセントポータブルトイレ スチール製丸型

取扱説明書

この度は、「ナセントポータブルトイレ スチール製丸型」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。この「取扱説明書」には、本製品の組立方法、使用上の注意事項を記載しております。正しく安全にお使い頂くために、必ずこの「取扱説明書」をお読みください。またお読みになった後も必ず保管してください。



長短取っ手型 (LS)



両中取っ手型 (MM)



両長取っ手型 (LL)

アイ・ソネックス株式会社

アイ・ソネックス株式会社

保証書

本製品は当社の厳密な製品検査に合格したものです。ご使用中に万一故障した場合は本保証書に記載された保証規定に従い修理させていただきますので、販売店または当社へ保証書を添えてお申し出下さい。

販売年月日	販売店名
年月日	年月日
販売店住所	
お名前	上欄に記入または捺印の無い場合は必ず販売店様発行の領収書またはその他購入年月日、店名等を証明するものを貼っておいてください。
ご住所	

保証規定

- この製品の保証期間は、お買い求めの日より1年です。
 - 取扱説明書に従ってご使用中に発生しました故障に関しては、保証期間中は無料で修理致します。
 - 次の場合には保証期間内でも実費を頂きます。
 - ご愛用者の不注意や、誤った取扱による故障。
 - 当社以外で修理または改造された場合。
 - 火災、地震その他の災害により生じた故障及び損傷。
 - 実費修理に要する運賃。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書の所定事項の未記入、販売店名の表示のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ※一度使用したものは、原則として製品のお取替はできません。
※製品についての各種お問い合わせはお求めの店、または下記へ直接ご連絡下さい。

アイ・ソネックス株式会社 本社 千702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7
<http://www.nasent.net/> TEL: 086-200-1550 FAX: 086-200-1553

品質向上のため、お断りなく仕様変更することがありますのでご了承ください。

DV07071015

安全上のご注意 必ずお守りください。


ご使用になられる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守り頂くことを、次のように説明しています。

警告	
●本製品を本来の目的以外で使用しないでください。	ケガをすることがあります。
●本製品をご使用する際は、必ず取っ手が固定されている事を確認してからご使用ください。	本体が壊れてケガをすることがあります。
●座る際や、使用後立ち上がる際など、ご使用者自身が身体の安全性を十分に確保できない場合は、介護者の付き添いが必要です。	転倒してケガをすることがあります。
●滑りやすい床面や安定の悪い場所で使用しないでください。	
●取っ手等を持って、真横から力を加えないでください。	
●廃棄する時は専門業者におまかせください。	焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
●改造や分解、仕様変更をしないでください。	破損またはケガをすることがあります。


注意	
●ベッドサイドでご使用の際は、ベッドと本製品の右側又は左側にすき間をあけずに隣接させてください。	より安全にご使用頂けます。
●本製品を踏台の代わりや、人を乗せたままでの移動に使用しないでください。	転倒してケガをすることがあります。
●取っ手に腰掛けしないでください。	
●幼児を1人で座らせしないでください。	
●必ず1人で座ってください。	
●便座、お座りパット以外の部分に腰掛けしないでください。	
●張地の破れや、クッションが壊れたまま座らないでください。	ケガをすることがあります。
●便座及び本体、パケツはナイフで削ったり、金属タワシなどでこすったりしないでください。	便座及び本体、パケツが破損、傷が付くことがあります。
●組立後、ネジがゆるんだまま使用しないでください。時々定期的に点検してください。	本体が壊れてケガをすることがあります。
●異常を発見したまま使用しないでください。	
●火の側に近づけないでください。	火災になることがあります。
●脚の裏側は定期的にお掃除してください。	脚裏にゴミなどが付着し、床を汚す場合があります。
●屋外に放置したり、直射日光に当てたりしないでください。	色あせやひび割れ、変形の原因となります。
●湿気および乾燥の著しい場所での使用はさけてください。	
●床の材質や、ワックス・薬剤等によって、脚先ゴムが色移りする場合があります。	シート等をご使用ください。

仕様

- サイズ:
幅52cm×奥行70.5cm×高さ76.5~91.5cm
座面高さ調節: 7段階調節 2.5cm刻み
- 便座面の高さ: 35~50cm (7段階 2.5cm刻み)
- 取っ手高さ: 21・23.5cm (2段階 2.5cm刻み)
- 重量: 15.5kg

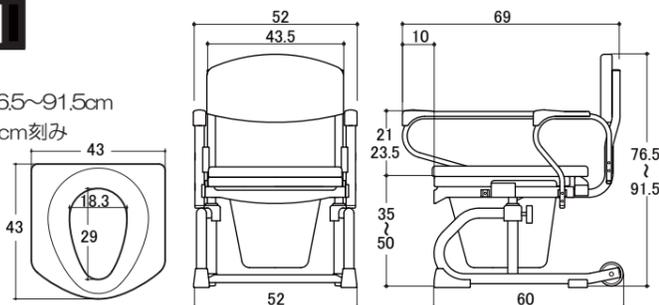

各部の名前

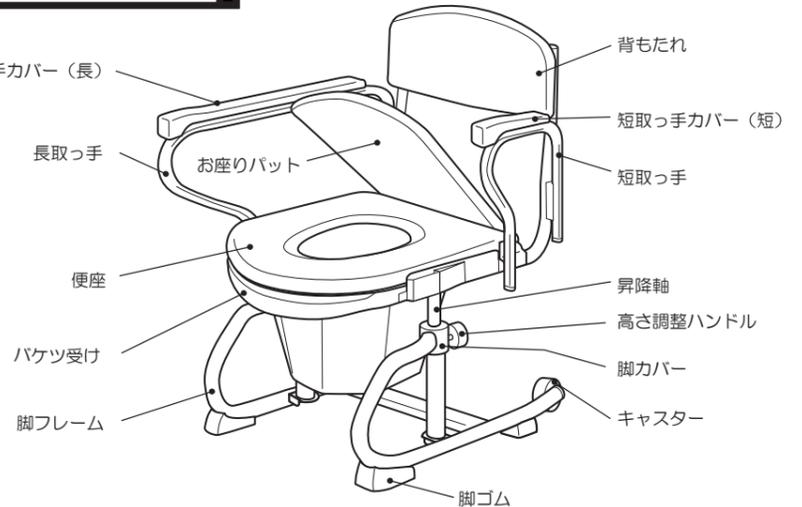

付属部品

数量をご確認ください。




専用パケツ・・・1個



ペーパーホルダー



便座・・・1個

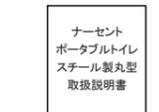

取扱説明書・・・1部

お手入れ方法


排泄用具ですので、こまめにお手入れをして汚れを取り除いてください。

注意 ナイフで削ったり、金属タワシなどでこすったりしないでください。

お手入れには、アルコール、シンナー、ベンジン、灯油、などの溶剤は絶対に使用しないでください。



- 便座
便座を本体から取り外し、洗剤を付けて水で洗い流してください。または、水で薄めた中性洗剤に布をひたし、強くしぼって拭き、さらに乾いた布で拭き取ってください。
- 専用パケツ
水洗い等をして汚れを残さないようにしてください。
- 本体
水にひたした布を強くしぼって拭き、さらに乾いた布で拭き取ってください。

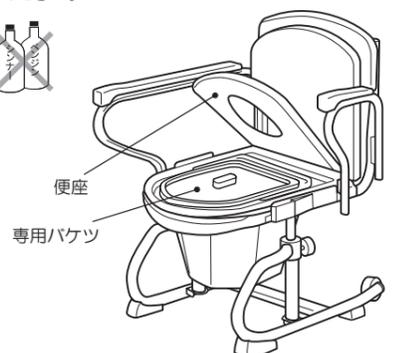

組立手順 ※注意事項をご確認の上、下記の手順に従って組み立てて下さい。

1 座面の高さ調節


※出荷時は35cmに取り付けています。

座面の高さは、35cm、37.5cm、40cm、42.5cm、45cm、47.5cm、50cmの7段階(2.5cm刻み)の調節ができます。


注意 作業中にお座りパットや便座で手をはさまないように注意して下さい。また、専用バケツは外しておいてください。

本体を持ちながら脚フレーム左右にある高さ調整ハンドルをゆるめてください。

座部本体を上下にずらし、ベッドの高さ、もしくは使用される高さに調節して脚カバー上面に昇降軸側面の凹マークを合わせて(図1参照)、高さ調整ハンドルを最後まで確実に押し込んでください。

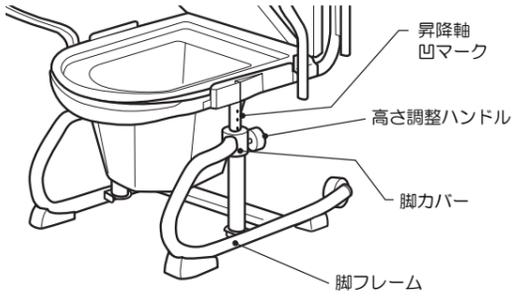


注意 両方の高さ調整ハンドルを確実に締めた状態でご使用下さい。どちらか片方でもゆるんだ状態でご使用になると、本体が壊れてケガをすることがあります。定期的な点検してください。

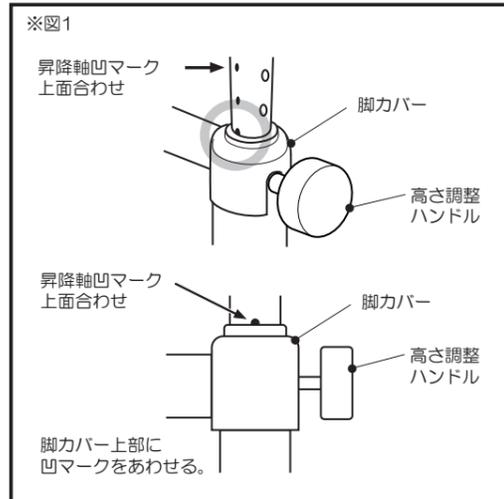

注意 左右の高さを合わせるために、昇降軸凹マークが左右同じ位置にあるか確認してください。

注意 座面の高さを変えるときは、座面と脚フレームの間(昇降軸部分)に、手を入れないでください。手をはさんでケガをすることがあります。

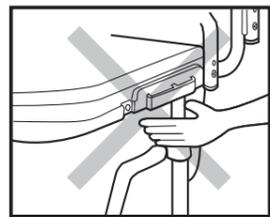

3 お座りパット・便座・専用バケツの取り付け/取り外し方

お座りパット・便座・専用バケツは取り付け/取り外しができますので、お手入れの際は取り外して行うことができます。


お座りパットを跳ね上げて、専用バケツ、便座の順に図1のようにセットしてください。

注意 バケツは専用のものをお使い下さい。


便座の取り付け 便座の取り付けに際しては、便座取付樹脂を便座回転軸に、図2のようにセットしてください。





お座りパットの取り付け お座りパットの取り付けに際しては、お座りパット取付樹脂をお座りパット回転軸、図3のようにセットしてください。

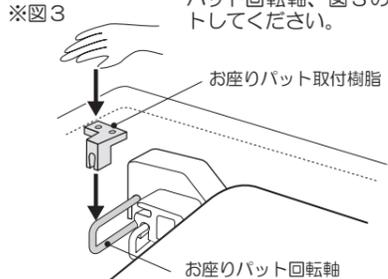

便座の取り外し

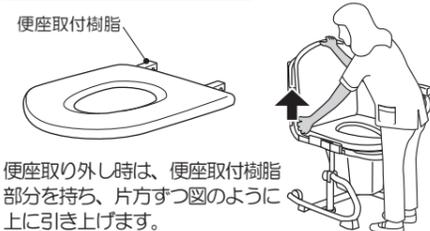

お座りパットの取り外し

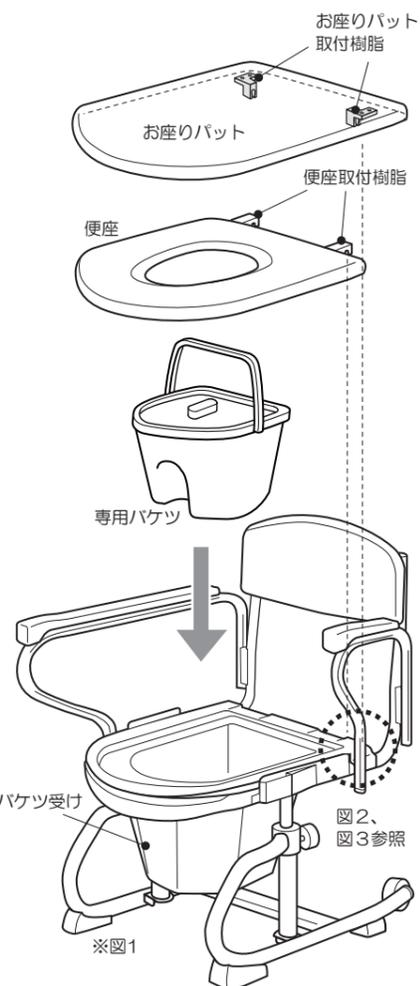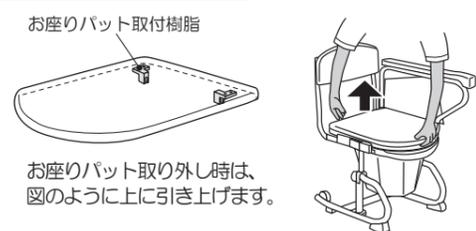

2 取っ手取り付け・高さの変え方

※出荷時は21cmに取り付けています。




注意 出荷時のネジはゆるめに締まっています。ご使用になれる際は、最後まで確実に締め付けてください。

長取っ手・中取っ手・短取っ手、左右どちら側にも取り付けできます。

取っ手のネジを(+ドライバー)でネジ①からゆるめて取り外し、取っ手を左右取り替えてください。

取り付けの際は取っ手の高さを上下いずれかに決め、ネジ②を仮締めし、取っ手前後の上下止め位置が合っていることを確認してから、ネジ①を締め、ネジ②を最後まで確実に締め付けてください。

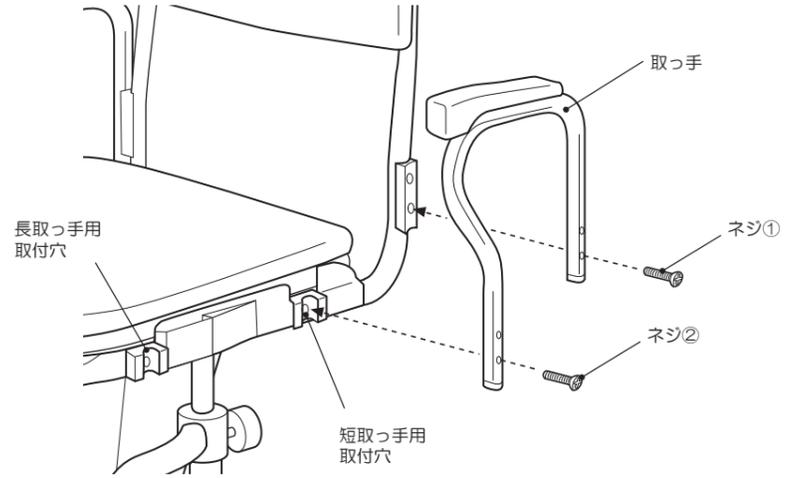

注意 手や指などを挟まないように十分注意してください。正しく固定されていないと、ケガをすることがあります。


※取っ手の追加購入は、部品購入費として介護保険の1割負担でご利用できます。



ペーパーホルダーの取り付け/取り外し方


左右どちら側にも取り付けできます。

※左右逆に取り付ける際は下記図を参考にして、向きを変えて取り付けてください。

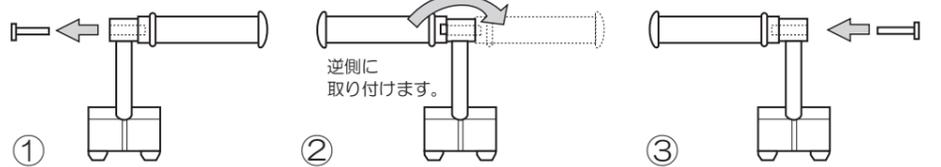


取り付け方

ペーパーホルダーを差し込むだけで取り付けできます。バケツ受け左右にある凸部穴にペーパーホルダーの「ツメ」を「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

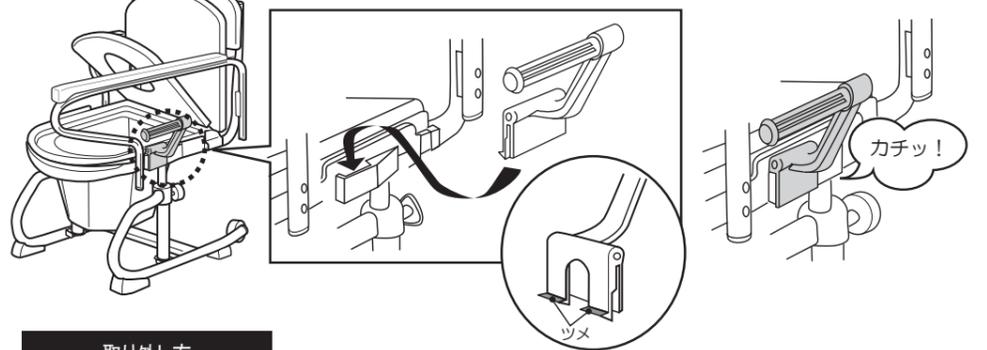

取り外し方

①バケツ受けを取り外します。②バケツ受けひっくり返します。③図のように「ツメ」を押してペーパーホルダーを取り外します。

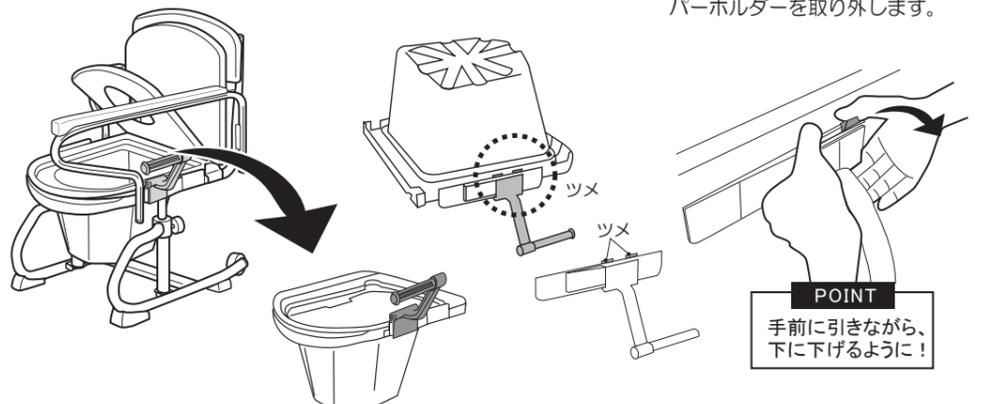

注意 ペーパーホルダーに荷重をかけないでください。破損の原因になります。