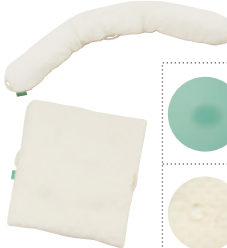
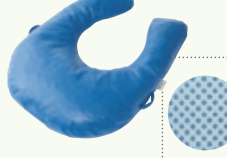


日常のお手入れについて【体位変換・ポジショニングクッション】

【表示内容について】 ◎ 最も適している ○ 適している △ あまり適していない × 不可

種 類	部 品	洗 濯			洗 剤 ・ 薬 剤					消 毒			耐 熱 温 度	取 扱 い 上 の ご 注 意
		手 洗 い	洗 濯 機	乾 燥 機	中 性 洗 剤	弱 アルカリ性洗剤	塩素系漂白剤	エタノール	（オスバン液） 逆性石鹼	熱湯消毒	オゾン消毒	オートクレーブ		
ナーセントパットA 	本 体	押し洗い ◎	×	×				△ 濃度50%以下 清拭のみ	×				100℃ 以下 30分以内	・脱水後、日陰乾燥
	通 気 カバー	◎	弱 流 ○ ネット使用	○ ネット使用	○	○	×	○	○	×	○	×	120℃ 以下 20分以内	
	防 水 カバー												75℃ 以下	
ナーセント Ex 	本 体						○ 2%に希釈			○			135℃ 以下 15分以内	・脱水後、日陰乾燥
	〈オプション〉 防 水 カバー	◎	弱 流 ○ ネット使用	○ ネット使用	○	○		○	○		○			・脱水後、裏返して日陰乾燥
	〈オプション〉 Ab防水 カバー						×			×		×	75℃ 以下	
メディカルパット 	本 体	押し洗い ◎	×	×			×	△ 濃度50%以下 清拭のみ	×				110℃ 以下 60分以内	・脱水後、日陰乾燥
	スワロー カバー	◎	弱 流 ○ ネット使用	○ ネット使用	○	○	△ 2%に希釈※	×	○	○	○	×		・脱水後、裏返して日陰乾燥 ・漂白剤の高頻度での使用は、生地を傷めるため、やむを得ない場合のみ使用可
ライトターン 	本 体				清 拭 の 〇	清 拭 の 〇	×	清 拭 の 〇	×				75℃ 以下	・水洗い、浸け置き不可。 清拭のみ
	カバー	×	×	×	〇	〇	×	〇	清 拭 の 〇	×	○	×		
ナーセントロール 	本 体	○	弱 流 ◎ ネット使用	○ ネット使用	○	○	△ 2%に希釈※	○	○	×	○	×	75℃ 以下	・脱水後、日陰乾燥
	カバー						×							・漂白剤の高頻度での使用は、生地を傷めるため、やむを得ない場合のみ使用可
ナーセントアップニー 	本 体	×	×	×	清 拭 の 〇	清 拭 の 〇	×	清 拭 の 〇	×				75℃ 以下	・水洗い、浸け置き不可。 清拭のみ
	カバー	◎	弱 流 ○ ネット使用	○ ネット使用	○	○		○	○	×	○	×		・脱水後、裏返して日陰乾燥
USAKO ユークッション 	本 体	×			清 拭 の 〇	清 拭 の 〇	清 拭 の 〇 2%に希釈	清 拭 の 〇	清 拭 の 〇				75℃ 以下	・水洗い、浸け置き不可。 清拭のみ
	〈オプション〉 メッシュ カバー	◎	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×		・脱水後、日陰乾燥