

日常のお手入れについて【車いすクッション】

【表示内容について】 ◎ 最も適している ○ 適している × 不可

種類	部品	洗濯			洗剤・薬剤					消毒			耐熱温度	取扱い上のご注意	
		手洗い	洗濯機	乾燥機	中性洗剤	弱アルカリ性洗剤	塩素系漂白剤	エタノール	逆性石鹼 (オスバン液)	熱湯消毒	オゾン消毒	オートクレーブ			
FC- コキュー君 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○		清拭のみ ○	清拭のみ ○				70℃以下	・水洗い、浸け置き不可。清拭のみ ・面材がバットを傷つけないよう個々に手洗い ・脱水後、日陰乾燥	
	ももバット	押し洗い ◎	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下		
	カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○		○	○				75℃以下		
ゲルファースト 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○		清拭のみ ○	清拭のみ ○				70℃以下	・水洗い、浸け置き不可。清拭のみ ・脱水後、日陰乾燥	
	通気カバー 防水カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下		
エルダークッション 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○		清拭のみ ○	清拭のみ ○				75℃以下	・水洗い、浸け置き不可。清拭のみ ・脱水後、裏返して日陰乾燥	
	防水カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下		
FC- クローバー 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○		清拭のみ ○	清拭のみ ○				70℃以下	・水洗い、浸け置き不可。清拭のみ ・脱水後、日陰乾燥	
	防水カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○	×	○	○	×	×	×	75℃以下		
FC- フィット (背) 	本体		弱流 ○ ネット使用	×			×			×			75℃以下	・脱水後、日陰乾燥	
	ロングバット	◎	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	100℃以下 30分以内		120℃以下 20分以内
	ロングバットカバー		弱流 ○ ネット使用	○			×			×			75℃以下		
FC- フィット (腰) 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○		清拭のみ ○	清拭のみ ○				75℃以下	・水洗い、浸け置き不可。清拭のみ ・脱水後、裏返して日陰乾燥	
	カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下		
FC-2 	背	カバー	◎	弱流 ○ ネット使用			×			×			75℃以下	・背ワットクッションは背板を抜いてから洗浄 ・脱水後、日陰乾燥	
		バット	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×	100℃以下 30分以内		120℃以下 20分以内
	座	本体		×		○	○				○	○	×	75℃以下	※濃度50%以下清拭のみ ・脱水後、日陰乾燥
		クッションバット カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○			×		△※	×			75℃以下	
FC- アジャスト 	背	カバー	◎	弱流 ○ ネット使用			×						75℃以下	・背ワットクッションは背板を抜いてから洗浄 ・脱水後、日陰乾燥	
		バット	○	×	×	○	○	○	○	○	×	○			×
	座	本体 大腿 バット クッション バット	◎	×		○	○				×	△※		75℃以下	※濃度50%以下清拭のみ ・脱水後、日陰乾燥
		カバー		弱流 ○ ネット使用	○			×		○					
USAKO クビマクラ 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○	清拭のみ ○ 2%に希釈	清拭のみ ○	清拭のみ ○				75℃以下	・水洗い、浸け置き不可。清拭のみ ・脱水後、日陰乾燥	
	(オプション) メッシュ カバー	◎	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下		