


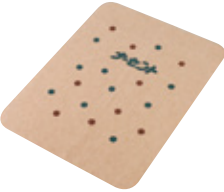


日常のお手入れについて【ポータブルトイレ】

【表示内容について】 ◎ 最も適している ○ 適している × 不可

種類	部品	洗濯方法			洗剤・薬剤					消毒方法			耐熱温度	取扱い上の注意
		手洗い	洗濯機	乾燥機	中性洗剤	弱アルカリ性洗剤	塩素系漂白剤	エタノール	（オスバン液） 逆性石鹼	熱湯消毒	オゾン	オートクレーブ		
ナーセントポータブルトイレ スチール製丸型 	本体				清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	×	清拭のみ ○	×	×		75℃以下	・水洗い不可、清拭のみ ・アセトンやシンナーなど有機溶剤の使用不可 ・高圧洗浄機、スチームクリーナーによる洗浄不可
	便座									×	○			
	バケツカバー				○	○		○	○			×	120℃以下	・本体から取り外してから洗浄
	バケツ						×			○	×			
ナーセントポータブルトイレ 木製ピボット型 	本体				清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	×	清拭のみ ○	×	×		75℃以下	・水洗い不可、清拭のみ ・アセトンやシンナーなど有機溶剤の使用不可 ・高圧洗浄機、スチームクリーナーによる洗浄不可
	便座									×	○	×		
	バケツ				○	○		○	○		○	×	120℃以下	・本体から取り外してから洗浄
ナーセント便座カバー 		◎	弱流 ○ ネット使用	×	○	○	×	×	○	×	×	×	75℃以下	・パイプを取り外してから洗濯
ナーセントトイレマット 		◎	弱流 ○ ネット使用	×	○	○	×	×	○	×	×	×	75℃以下	・洗濯機でのお手入れは、手洗いモードを使用