

日常のお手入れについて【体位変換・ポジショニングクッション】

【表示内容について】 ◎ 最も適している ○ 適している △ あまり適していない × 不可

種類	部品	洗濯			洗剤・薬剤					消毒			耐熱温度	取扱い上のご注意
		手洗い	洗濯機	乾燥機	中性洗剤	弱アルカリ性洗剤	塩素系漂白剤	エタノール	（オスバン液） 逆性石鹼	熱湯消毒	オゾン消毒	オートクレーブ		
 ナーセントパットA	本体	押し洗い◎	×	×				△ 濃度50%以下 清拭のみ	×				100℃以下 30分以内	・脱水後、日陰乾燥 ・脱水後、裏返して日陰乾燥
	通気カバー	◎	弱流○	○	○	○	×			×	○	×	120℃以下 20分以内	
	防水カバー	◎	○ ネット使用	○ ネット使用									75℃以下	
 ナーセント Ex	本体						○ 2%に希釈			○			135℃以下 15分以内	・脱水後、日陰乾燥 ・脱水後、裏返して日陰乾燥
	〈オプション〉 防水カバー	◎	弱流○ ネット使用	○ ネット使用	○	○			○	○			75℃以下	
	〈オプション〉 Ab防水カバー						×				×			
 メディカルパット スワロー	本体	押し洗い◎	×	×				△ 濃度50%以下 清拭のみ	×				110℃以下 60分以内	・脱水後、日陰乾燥 ・脱水後、裏返して日陰乾燥 ※漂白剤の高頻度での使用は、生地を傷めるため、やむを得ない場合のみ使用可
	カバー	◎	弱流○ ネット使用	○ ネット使用	○	○	△ 2%に希釈 ※	○	○	○	○	×		
 ライトターン	本体				清拭のみ○	清拭のみ○	×	清拭のみ○	×				75℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 清拭のみ ※アルコールの高頻度での使用は生地を傷めるため、やむを得ない場合のみ使用可
	カバー	×	×	×				△※ 清拭のみ○		×	○	×		
 ナーセントロール	本体						△ 2%に希釈 ※						75℃以下	・脱水後、日陰乾燥 ※漂白剤の高頻度での使用は、生地を傷めるため、やむを得ない場合のみ使用可
	カバー	○	弱流◎ ネット使用	○ ネット使用	○	○	×		○	○	×	×		
 ナーセントアップニー	本体	×	×	×	清拭のみ○	清拭のみ○	×	清拭のみ○	×				75℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 清拭のみ ・脱水後、裏返して日陰乾燥
	カバー	◎	弱流○ ネット使用	○ ネット使用	○	○		○	○	×	○	×		
 USAKO ユークッション	本体	×			清拭のみ○	清拭のみ○	清拭のみ○ 2%に希釈	清拭のみ○	清拭のみ○				75℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 清拭のみ ・脱水後、日陰乾燥
	〈オプション〉 メッシュカバー	◎	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×		