

摂食嚥下をサポートする。



介護保険：福祉用具貸与(車いす付属品)

PAT.P 意匠第 1521629 号

14,300 円 (うち消費税額 1,300 円)



頭や首を適切に保持できない方のために。
頭頸部をしっかりサポートする摂食嚥下用マクラ。

頭頸部を適切に保持することで、摂食嚥下や呼吸を楽にし、誤嚥防止の姿勢を提供します。
背もたれ延長型のリクライニング式車いすに固定でき、別売の角度ベースなどで頸部角度の調整ができます。取り外してベッドでも使用できます。



こんな声がよせられています！

- ・飲み込みやすくなり、食べこぼしが少なくなった
- ・口の動きが良くなり、嚥下がスムーズになった
- ・頭部が安定し、食事介助が楽になった
- ・頭部や頭部の緊張が緩和し、呼吸が深くなった
- ・頭部の床ずれが治った



介護保険：福祉用具貸与(体位変換器)

体位変換用ハンドル付！




Mサイズ 10,780 円
(うち消費税額 980 円)

Lサイズ 15,620 円
(うち消費税額 1,420 円)

上肢サポートクッション。
肩と腕をしっかり支えます。

長いアームで肩や腕の荷重を支えて、首や肩の緊張を緩和、嚥下を楽にします。また、体幹を左右からホールドするので、安全で快適な食事姿勢を提供します。

肩までしっかり届く、アームサポート

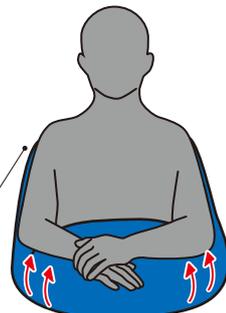

ふんわり素材の吸汗タイプも！
ナセント®Ex ユー



Lサイズ

ナーセント Ex ユー (M サイズ)

¥10,120 (うち消費税額 920 円)
JAN コード：4560232691385
TAIS コード：00149-000038

ナーセント Ex ユー (L サイズ)


¥14,080 (うち消費税額 1,280 円)
JAN コード：4560232691378
TAIS コード：00149-000039

〈素材〉表材：ポリエステル 100%
※クビマクラに吸汗タイプはございません。

USAKOシリーズのお手入れについて

- 洗濯機・乾燥機はご使用になれません。汚れたら、水または中性洗剤、希釈した塩素系漂白剤で清拭してください。
- 塩素系漂白剤をご使用の場合は2%以下に希釈してください。つけ置きはしないでください。

クビマクラの設置目安

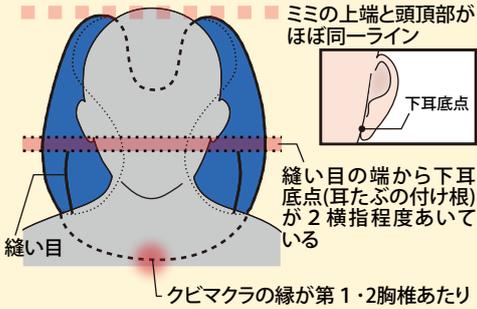

クビマクラの合わせ方と使用方法

車いすで

1



車いすのヘッドレストを外し、クビマクラと背シートの面ファスナーを合わせます。


2



頸部前屈位にする際の角度調整は、オプションの角度ベースや、折りたたんだタオル等で行います。




USAKO クビマクラ

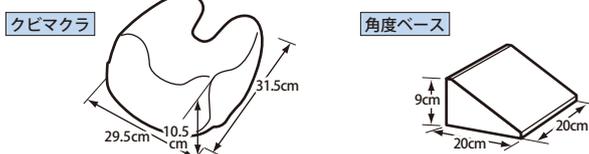

品名	価格(税込)	重量	TAISコード	JANコード
USAKOクビマクラ	¥14,300	440g	00149-000044	4560232691736
USAKO角度ベース	¥1,980	72g	-	4560232691743

材質 USAKOクビマクラ: 〈中材〉ウレタン複合材
〈表材〉ポリエステル100%(表面ウレタンフィルムラミネート加工)
USAKO角度ベース: ポリエチレン発泡体

USAKO ユークッション

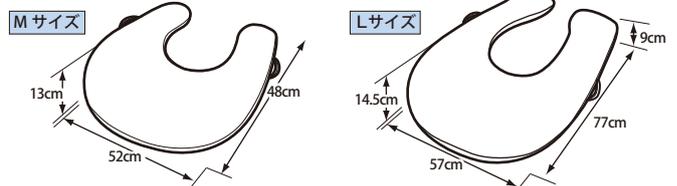

品名	価格(税込)	重量	TAISコード	JANコード
USAKO ユークッション	M ¥10,780	680g	00149-000040	4560232691811
	L ¥15,620	1340g	00149-000041	4560232691828

材質 〈中材〉ポリエステル繊維チップ
〈表材〉ポリエステル100%(表面ウレタンフィルムラミネート加工)

USAKOシリーズのご用命は

アイ・ソネックス株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7

TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

<https://www.nasent.net>

このカタログに掲載の商品について、品質向上のためお断りなく仕様を変更する場合商品の実際の色が印刷色と若干異なる場合がございます。恐れ入りますが予めご了承ください。

2021.02