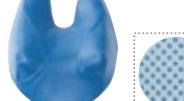


# 日常のお手入れについて【車いすクッション】

【表示内容について】 ◎ 最も適している ○ 適している × 不可

種類	部品	洗濯			洗剤・薬剤					消毒			耐熱温度	取扱い上のご注意		
		手洗い	洗濯機	乾燥機	中性洗剤	弱アルカリ性洗剤	塩素系漂白剤	エタノール	逆性石鹼 (オスバン液)	熱湯消毒	オゾン消毒	オートクレープ				
FC-コキュウ君 	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 清拭のみ ・面ファスナーで傷つけないよう個々に手洗い ・脱水後、日陰乾燥		
	ももパット	◎	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×				
	カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○	×	○	○	×	○	×			75℃以下	・脱水後、日陰乾燥
ゲルファースト 	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 清拭のみ ・脱水後、日陰乾燥		
	通気カバー 防水カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○	×	○	○	×	○	×			75℃以下	・脱水後、裏返して 日陰乾燥
エルダークッション 	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 清拭のみ ・脱水後、裏返して 日陰乾燥		
	防水カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○	×	○	○	×	○	×				
FC-フィット (背) 	本体	×	弱流 ○ ネット使用	×	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、日陰乾燥		
	ロングパット	◎	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×			100℃以下 30分以内	120℃以下 20分以内
	ロングパットカバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○	×	○	○	×	○	×			75℃以下	・脱水後、日陰乾燥
FC-フィット (腰) 	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 清拭のみ ・脱水後、裏返して 日陰乾燥		
	カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○	×	○	○	×	○	×				
FC-2 	背	カバー	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	75℃以下	・背ソフトクッションは、 背板を抜いてから洗浄 ・脱水後、日陰乾燥		
		パット	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×			100℃以下 30分以内	120℃以下 20分以内
	座	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、日陰乾燥	
		クッションパット カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○	×	○	○	×	○	×			
FC-アジャスト 	背	カバー	◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	75℃以下	・背ソフトクッションは、 背板を抜いてから洗浄 ・脱水後、日陰乾燥		
		パット	○	×	×	○	○	○	○	○	○	×				
	座	大腿パット クッションパット	◎	×	×	○	○	×	×	○	○	×				
		カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○	×	○	○	×	○			×	
USAKO クビマクラ 	本体	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	×	75℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 清拭のみ ・脱水後、日陰乾燥		
	(オプション) メッシュ カバー	◎	×	×	○	○	○	○	○	×	○	×				
FC-ファイン 	背	本体	×	×	×	○	○	×	×	○	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 清拭のみ ※タンブラー乾燥は不可。		
		カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	※ ○	○	○	×	○	○	×	○			×	75℃以下
	座	本体	×	×	×	○	○	×	×	○	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 清拭のみ		
		カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○	○	○	×	○	×			75℃以下	・脱水後、裏返して 日陰乾燥