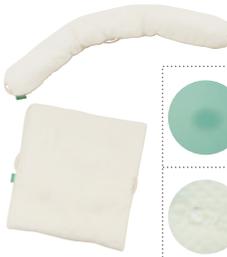


# 日常のお手入れについて【体位変換・ポジショニングクッション】

【表示内容について】 ◎ 最も適している ○ 適している △ あまり適していない × 不可

種類	部品	洗濯			洗剤・薬剤					消毒			耐熱温度	取り扱い上のご注意
		手洗い	洗濯機	乾燥機	中性洗剤	弱アルカリ性洗剤	塩素系漂白剤	エタノール	逆性石鹼 <small>(オスバン液)</small>	熱湯消毒	オゾン消毒	オートクレーブ		
ナーセントパットA 	本体	押し洗い◎	×	×				△ 濃度50%以下 清拭のみ					100℃以下 30分以内	・脱水後、日陰乾燥
	通気カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○ ネット使用	○	○	×		○	×	○	×	120℃以下 20分以内	
	防水カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○ ネット使用									75℃以下	
ナーセント Ex 	本体						○ 2%に希釈						135℃以下 15分以内	・脱水後、日陰乾燥
	〈オプション〉 防水カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○ ネット使用	○	○			○		○		75℃以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥
	〈オプション〉 Ab防水カバー						×							
メディカルパット 	本体	押し洗い◎	×	×			×	△ 濃度50%以下 清拭のみ						・脱水後、日陰乾燥
	カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○ ネット使用	○	○	△ 2%に希釈 ※		○	○	○	×	110℃以下 60分以内	・脱水後、裏返して日陰乾燥 ※漂白剤の高頻度での使用は生地を傷めるため、やむを得ない場合のみ使用可
ライトターン 	本体				清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○					・水洗い、浸け置き不可。清拭のみ
	カバー	×	×	×				△ ※					75℃以下	※アルコールの高頻度での使用は生地を傷めるためやむを得ない場合のみ使用可
ナーセントロール 	本体						△ 2%に希釈 ※							・脱水後、日陰乾燥
	カバー	○	弱流 ◎ ネット使用	○ ネット使用	○	○	×		○	○	×		75℃以下	※漂白剤の高頻度での使用は生地を傷めるためやむを得ない場合のみ使用可
ナーセントアップニー 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○					・水洗い、浸け置き不可。清拭のみ
	カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○ ネット使用	○	○			○	○			75℃以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥
USAKO シリーズ 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○	清拭のみ ○ 2%に希釈	清拭のみ ○	清拭のみ ○					・水洗い、浸け置き不可。清拭のみ
	〈オプション〉 メッシュカバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○ ネット使用	○	○	×	○	○				75℃以下	・脱水後、日陰乾燥

# 日常のお手入れについて【ポジショニングマットレス】

[表示内容について] ◎ 最も適している ○ 適している △ あまり適していない × 不可

種類	部品	洗濯			洗剤・薬剤					消毒			耐熱温度	取扱い上のご注意
		手洗い	洗濯機	乾燥機	中性洗剤	弱アルカリ性洗剤	塩素系漂白剤	エタノール	逆性石鹼 <small>(オスバン液)</small>	熱湯消毒	オゾン消毒	オートクレープ		
ナーセントコンタ   防水タイプ   通気タイプ	本体	【ご家庭でのメンテナンス】												
		×	×	×	清拭のみ ○※1	清拭のみ ○※1	×	清拭のみ △※2	清拭のみ ○※1	×	—	—	80℃以下	・定期的に日陰乾燥 ※1 水洗い、浸け置き不可。清拭のみ（洗剤が残留しないように十分に拭き取り乾燥させること） ※2 アルコールの高頻度での使用はウレタンを傷めるためやむを得ない場合のみ使用可
	防水カバー	【業務用機械でメンテナンス】												
		◎	○	○	○	○	×	清拭のみ △※	○	×	×	×	80℃以下	・洗浄時は洗剤が残留しないよう十分洗い流す ・濡れたまま長時間放置しない ※アルコールの高頻度での使用はウレタンを傷めるためやむを得ない場合のみ使用可
		○	×	×	清拭のみ ○※	清拭のみ ○※	清拭のみ ○※	清拭のみ ○※	清拭のみ ○※	×	×	×	75℃以下	・洗濯はねすわりガイドを取り外してから洗浄 ・脱水後、裏返して日陰乾燥 ※表・側面のみ（底面には使用不可）
		◎	弱流 ○ ネット使用	○※	○	○	×	○	○	○	○	○	×	80℃以下
内カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○※	○	○	×	○	○	○	○	×	80℃以下	・脱水後、日陰乾燥 ※タンブル乾燥は不可	
ねすわりガイド	○	×	×	○	○	×	○	○	×	×	×	80℃以下	・シワにならないように洗浄	