

日常のお手入れについて【車いすクッション】

【表示内容について】 ◎ 最も適している ○ 適している × 不可

種類	部品	洗濯			洗剤・薬剤					消毒			耐熱温度	取扱い上のご注意	
		手洗い	洗濯機	乾燥機	中性洗剤	弱アルカリ性洗剤	塩素系漂白剤	エタノール	(オスバン液) 逆性石鹼	熱湯消毒	オゾン消毒	オートクレーブ			
FC- コキュー君 NV 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○		清拭のみ ○	清拭のみ ○				70℃以下	・水洗い、浸け置き不可 清拭のみ ・面ファスナーで傷つけないよう個々に手洗い ・脱水後、日陰乾燥	
	ももパット	押し洗い ◎	×	×			×			×	○	×			
	カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○											75℃以下
FC- フィット (背) 	本体		弱流 ○ ネット使用				×			×			75℃以下	・脱水後、日陰乾燥	
	ロングパット	◎	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	100℃以下 30分以内		120℃以下 20分以内
	ロングパットカバー		弱流 ○ ネット使用	○			×			×			75℃以下		・脱水後、日陰乾燥
FC- フィット (腰) 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○		清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	○	×	75℃以下	・水洗い、浸け置き不可 清拭のみ ・脱水後、裏返して日陰乾燥	
	カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○		○	○						
エルダークッション 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○		清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	○	×	75℃以下	・水洗い、浸け置き不可 清拭のみ ・脱水後、裏返して日陰乾燥	
	防水カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○	×	○	○						
ゲルファースト 	本体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○		清拭のみ ○	清拭のみ ○	×	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可 清拭のみ ・脱水後、日陰乾燥 ・脱水後、裏返して日陰乾燥	
	通気カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下		
	防水カバー														
FC- アジャスト 	カバー	◎					×						75℃以下	・背ソフトクッションは背板を抜いてから洗浄 ・脱水後、日陰乾燥 ・脱水後、日陰乾燥	
	背パット	○		×			○		○	×	○	×			
	本体		×	×	○	○			○	×	○	×			
	大腿パット						×		×						
	クッションパット	◎	弱流 ○ ネット使用	○			×		○						
カバー															
FC- ファイン 	背本体	×	×	×				×	清拭のみ ○				70℃以下	・水洗い、浸け置き不可 清拭のみ ※タンブラー乾燥は不可 ・水洗い、浸け置き不可 清拭のみ ・脱水後、裏返して日陰乾燥	
	背カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	※ ○			×		○	○	×	○	75℃以下		
	座本体	×	×	×	○	○	×	×	清拭のみ ○	×	○	×	70℃以下		
	座カバー	◎	弱流 ○ ネット使用	○					○	○			75℃以下		