

車いすクッション

FC-クッションシリーズ


FC-CUSHION SERIES



弊社 Web サイトでは、
ポジショニングや姿勢づくりを
詳しくご紹介しています

<https://www.nasent.net> ナーセント 検索

使用例の
動画も配信中!

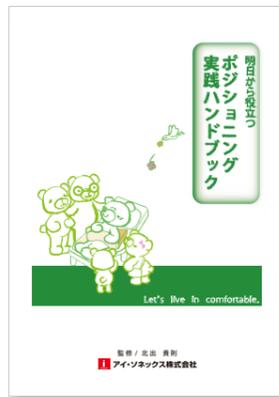

アイ・ソネックス 株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7
TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

FC-CUSHION

Seating 快適に座る

起きている時間のうち、
座って活動する時間はとても大切。
食べたり、くつろいだり、移動したり、
時には車椅子を足で漕いだり。
様々な生活シーンで動きやすく、
快適に座れるようなクッションを
作りました。



「りはとけあ」とは、わたしたちが、アイ・ソネックスの
プロダクト全体を通して提案する、新しい介護のカタチです。
「気持ちよく眠る」、「立ち上がる」、「快適に座る」、
「美味しく食べる」、「スッキリ出す」という5つの活動が
プロダクトによってより良く変化することで、生活の
好循環が回り出す、そんな介護スタイルの提供を
目指しています。

「床ずれリスク」から見た座クッションの選び方

高	中	低
積極的に床ずれを防止したい方に	座位時間が長くて姿勢が崩れる方に	座位の安定と動きやすさの両方を求める方に
FC-コキュー君NV もも着脱タイプ P.3 掲載 ももパットを外すとクッションの前座が低くなるので足こぎに最適	FC-ファイン 座クッション P.8 掲載 ハイタイプ ロータイプ ジャバラスリットの働きで前滑りにくい	FC-アジャスト 座クッション P.7 掲載 ももパットを外すと前座が低くなるので足こぎに最適
FC-コキュー君NV フラットタイプ P.3 掲載 フラットなので乗り降りしやすい	エルダークッション P.5 掲載 立体構造が前すべりを防いで良い姿勢に	ガルファースト P.5 掲載 皮膚への摩擦やずれの力を吸収

「姿勢保持力=ホールド性」から見た背クッションの選び方

強	中	弱
体幹や腰をしっかり支えないと座位姿勢が保てない方に	体幹や腰を支えることで活動性を高めることができる方に	腰痛などで支えがあると座位が楽に続けられる方に
FC-フィット(背) P.6 掲載 通常の背クッションでは支えきれない方でも超ロングタイプのパットがしっかり届いて保持	FC-アジャスト 背クッションフルタイプ P.7 掲載 片麻痺などのため体幹が横倒れするのを防止	FC-ファイン 背クッションロングタイプ P.8 掲載 置くだけで体幹や骨盤にフィットするので面倒な背張り調整が不要
FC-フィット(腰) P.6 掲載 車いす背シートと骨盤の間の隙間を埋めて骨盤後傾を防止	FC-アジャスト 背クッション標準タイプ P.7 掲載 骨盤サポート付の車いすでの使用や体幹の横倒れを防止	FC-ファイン 背クッションショートタイプ P.8 掲載 骨盤サポート付の車いすや食卓椅子などに適合

■クッションの形状



乗り降りしやすい

フラットタイプ

凹凸がないので車いすへの乗り降りがしやすいタイプです。



床ずれ防止+姿勢保持

コンタータイプ

臀部に沿う形状で体圧分散性と姿勢保持性を兼ね備えています。



足こぎ対応

もも着脱タイプ


ももパットを取り外すと前座面が低くなり足こぎがしやすくなります。

■底面の形状



テーパータイプ

船底形状で車いすの座シートにフィット。座シートのたるみを吸収、座位姿勢が安定します。

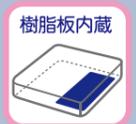

樹脂板内蔵タイプ

滑りすわりなどで車いす座面が短くなる方に。車いす座面より前出ししても樹脂板によりクッションが変形せず、大腿を支えます。

■体幹パットの種類



独立調整

独立調整型パット

上下・左右に移動できるので、体型に合わせてより細かな調整ができます。



一体調整

一体型パット

クッションとパットが一体化。拡げて設置するだけで調整手間がありません。



ロングタイプ

ロングパット

通常のパットの約2倍の長さがあり体幹をしっかり支えます。

■車いすへのとめつけ方



面ファスナー固定

面ファスナータイプ

面ファスナーで簡単固定。車いす背シートにかぶせるように取り付けます。



バックル固定

バックルタイプ

左右のベルトバックルで簡単固定。高さの調整が可能です。

FC-コキュ-君NV

床ずれ対策にベスト！ 目玉バルブの 自動調圧エアクッション



床ずれ防止+姿勢保持

もも着脱タイプ



床ずれ防止+姿勢保持 乗り降りしやすい

フラットタイプ

目玉バルブで、吸排気を自動コントロール

座ると自動的に空気を排気してお尻の形にフィット、立ち上がると素早く元の形状に復元、座るたびに最適な座り心地を得られます。

体動に合わせてエアを素早く吸排気するので、長時間座っても疲れにくいクッションです。



バルブのリリーフ機能でどすん！と座っても安心

勢よく座った時にはエアを一気に排出。着座時の衝撃や痛みを緩和し、急激な内圧上昇によるパンクも防ぎます。


▼エアを一気に排出する「リリーフ機能」



ひとつのバルブで幅広い対象者をカバー


体重 35 ~ 85kg の対象者に適応

フラットタイプで測定

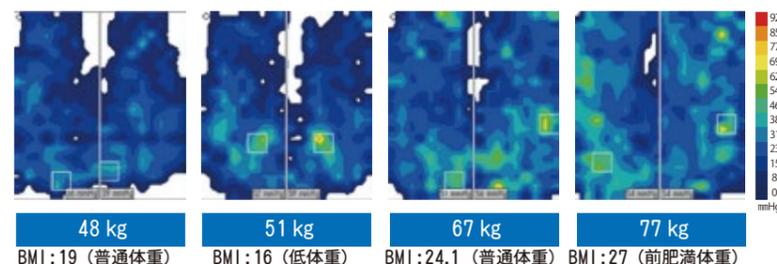

エアとウレタンのハイブリッド構造、体圧分散+姿勢保持を両立

エアの体圧分散性と、ウレタンの姿勢保持性によって、床ずれを防止しながら、座位姿勢の安定性を高めます。

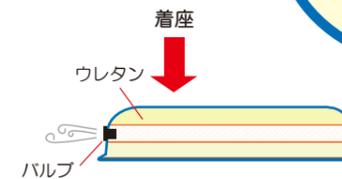

おしりの形に自動フィット!



足こぎ対応! もも着脱タイプ

体圧分散性を高める

コンター層

エアを吸排気する

エア層

姿勢を安定させる

底つき防止層

仙骨を除圧

前滑りを防止

骨盤後傾を防止



ももパット

片側ずつ取り外しが可能
取り外すと前座面の厚みが3cmに



乗り降りしやすい! フラットタイプ

体圧分散性を高める

コンター層

エアを吸排気する

エア層

姿勢を安定させる

底つき防止層

仙骨を除圧

内転防止パッド

両下肢の内転を防止
自然な座位姿勢に

サイドサポート

両サイドから骨盤を
安定的に保持



おすすめ対象者



前すべり



姿勢が不安定



おしりが痛い

- ・座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- ・姿勢の崩れや前滑りを防止したい方
- ・片麻痺で足こぎをされる方
- ・股関節を深く屈曲できない方(大腿骨頸部骨折後、関節リウマチなど)

おすすめ対象者



前すべり



姿勢が不安定




おしりが痛い


- ・座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- ・失禁や失便が多く、汚れが気になる方
- ・長時間車いすに座って過ごされる方
- ・車いすに乗り降りしやすいクッションが欲しい方

〈寸法〉


● もも着脱タイプ

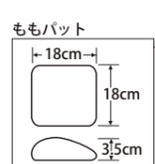

● フラットタイプ

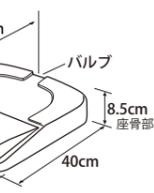

〈カバー〉

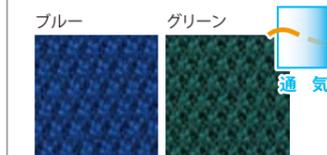


材質

〈カバー〉 表生地：ポリエステル、裏生地：ナイロン(ウレタン樹脂塗布)、〈クッション〉 ウレタン樹脂フィルム、ウレタン複合材、〈バルブ〉 硬質PVC、ニトリルゴム

エルダークッション

5層構造で姿勢を安定！

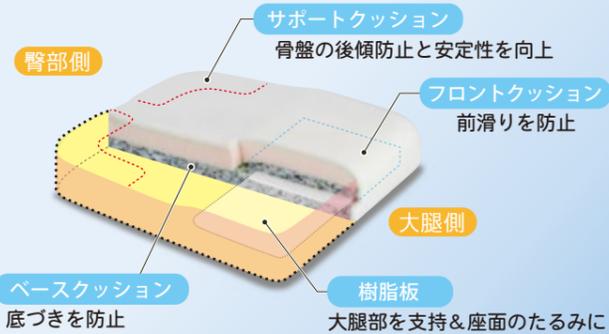

自然に良姿勢になる立体構造

硬さの異なる3層のクッションにサポートとフロントクッションの2層を挟み込むことで、おしりに沿う凹型フォルムを実現。座ると自然に姿勢が安定します。



円背や滑り座りのため、座面が短くなる方に。クッションを座シートより前に出しても、樹脂板によりクッションが折れ曲がらず、しっかり大腿部を支えます。



おすすめ対象者



- 前すべりを防止したい方
- 姿勢を安定させたい方
- 長時間座位でおしりが痛い方

ゲルファースト

内蔵ゲルでずれの力を吸収！



おしりを守るソフトゲル

おしりを支える後方に柔らかいゲルを内蔵。おしりの動きにつれてゲルが動くので、皮膚に働くずれの力を弱めます。



お手入れ簡単

ウレタンフィルムで全面が覆われているので汚れても清拭だけでキレイに。



おすすめ対象者



- 前すべりなどでおしりがずれて痛い方
- 薄くて底づきしないクッションが欲しい方
- 車いすに乗り降りしやすいクッションが欲しい方

FC-フィット(背)

超ロングパットがしっかり届く！




超ロングなパットで体幹をしっかりサポート


円背の方など、通常のパットでは体幹に届かない方もしっかりサポート。3段階の高さ調整と幅の調整で、最適な位置に合わせることができます。



高さ調整

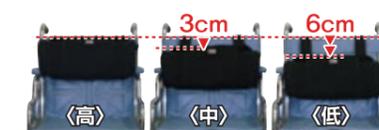

幅調整

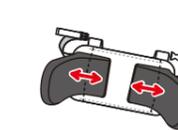

おすすめ対象者



- 円背の方
- 斜めすわりの方
- 前かがみ姿勢の方

FC-フィット(腰)


縦横ラインが骨盤をホールド！




骨盤にフィットする立体フォルム

車いすと身体の間隙を埋めて、骨盤の回旋・後傾の進行を防止。さらに、腰回りをしっかり支えることで、座骨や仙骨にかかる体圧を分散します。

骨盤回旋の防止

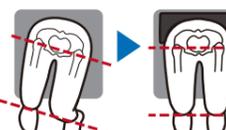

後傾した骨盤を支持

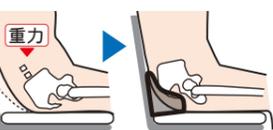


おすすめ対象者




- 骨盤が後傾している方
- 骨盤が回旋している方
- 車いすが大きすぎて姿勢が崩れてしまう方




材質 〈防水カバー〉表生地: ポリエステル(裏面ウレタンフィルムラミネート加工)、裏生地: ナイロン(ウレタン樹脂塗布) 〈クッション〉ウレタン複合材、ポリエチレン

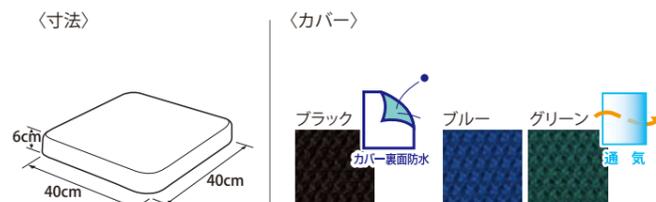

材質 〈防水カバー〉表生地: ポリエステル(裏面ウレタンフィルムラミネート加工)、裏生地: ナイロン(ウレタン樹脂塗布) 〈クッション〉ウレタン複合材、ポリエチレン

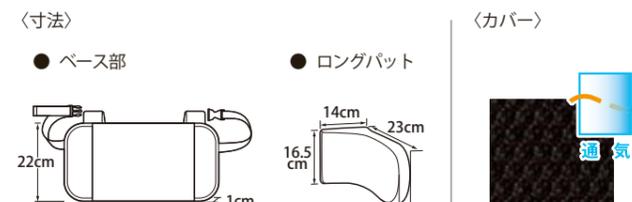

材質 〈ベース部〉表生地: ポリエステル、裏生地: ナイロン(ウレタン樹脂塗布)、ウレタン 〈パットカバー〉 ポリエステル 〈パット〉 エルク・V-Lap®

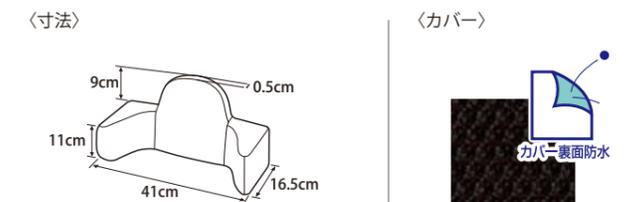

材質 〈防水カバー〉表生地: ポリエステル(裏面ウレタンフィルムラミネート加工)、裏生地: ナイロン(ウレタン樹脂塗布) 〈クッション〉ウレタン複合材



FC-アジャスト

姿勢を保持して、活動をサポート！



体幹や骨盤をしっかりサポートする背クッション

サイドパットが体幹を保持し、骨盤パットが骨盤の後傾を防止。最適な位置に取り付けできるので、一人ひとりの身体状況に合わせて、細やかに調整することができます。

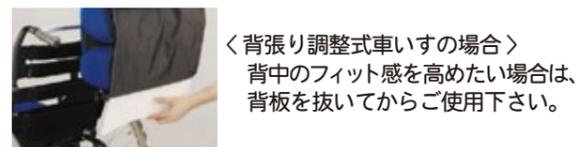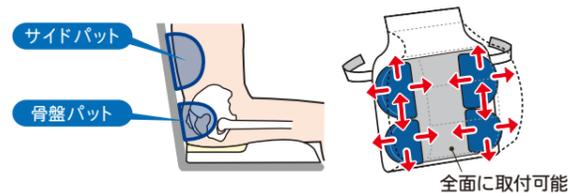

姿勢を安定させて活動をサポートする座クッション

硬質ポリエチレンシートを成型加工することで、座位姿勢を安定させる3Dデザインを実現。テーパードカット形状の底面は、座シートのたるみを吸収し、安定した座面を提供します。





おすすめ対象者




FC-ファイン

ジャバラスリットで簡単、フィット！

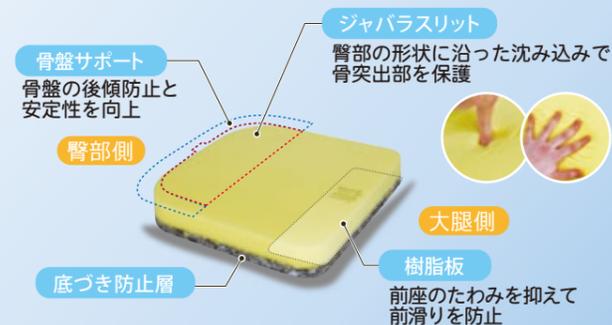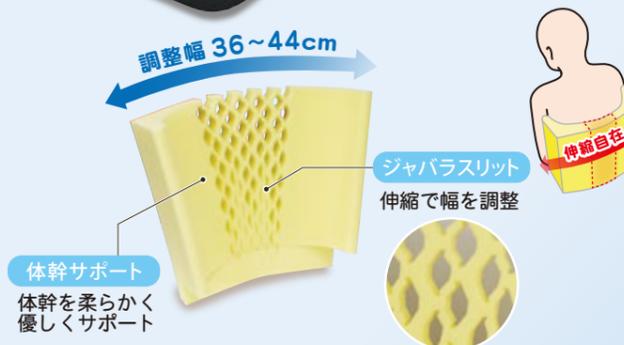

パツと拡げて合わせるだけ！体側を優しくサポート

ジャバラスリットの伸縮でパット調整が不要。背中や体側に心地よくフィットします。

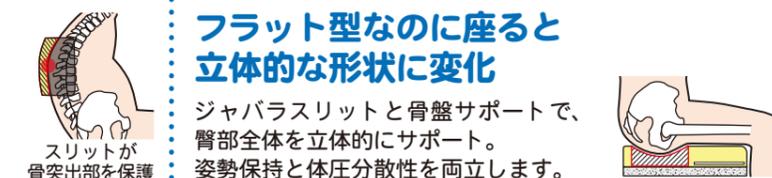

ロングタイプは2Way仕様

身長・体型によって上下を入れ替えて使用することで、座の奥行調整ができます。




クッションの前出しでさらに快適


樹脂板内蔵で座シートより前に出しても大丈夫。大腿部をしっかり支えます。



おすすめ対象者

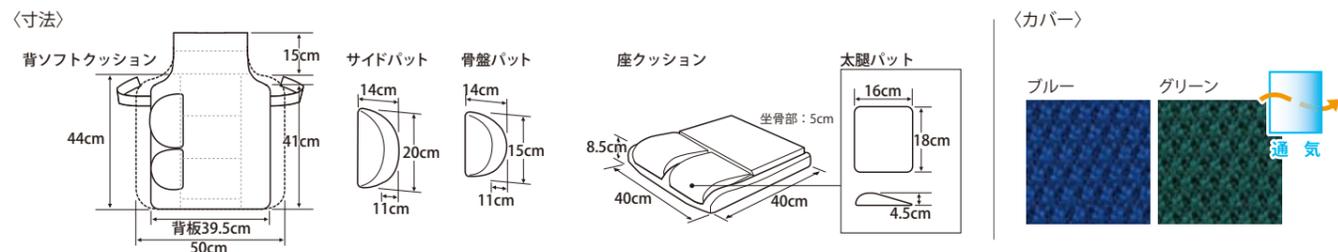

材質 〈背ソフトクッション〉 ポリエステル、ナイロン、ウレタン 〈座カバー〉 表生地: ポリエステル、ウレタン、裏生地: ナイロン (ウレタン樹脂塗布) 〈パッドカバー〉 ポリエステル 〈パッド〉 ポリエチレン 〈座クッション〉 ポリエチレン、ウレタン

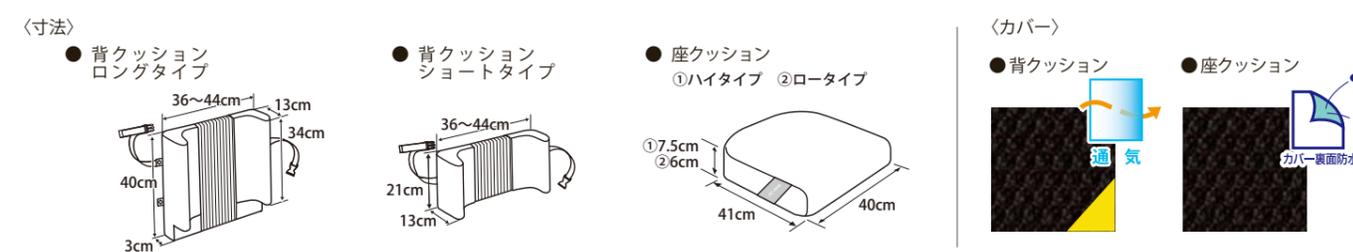

材質 【背クッション】 〈カバー〉 ポリエステル100% 〈クッション〉 ウレタンフォーム 〈内カバー〉 ストックネット 【座クッション】 〈防水カバー〉 表材: ポリエステル (裏面ウレタンフィルムラミネート加工)、裏面: ナイロン (ウレタン樹脂塗布) 〈クッション〉 ウレタン複合材

製品仕様

●FC-コキュー君 NV

品名	色	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAISコード	JANコード	
FC-コキュー君 NV	もも着脱タイプ	ブルー グリーン	¥35,200	40×42×8.5(座骨部:8)	820	00149-000064	4560232693761 4560232693754
	フラットタイプ	ブルー グリーン	¥30,800	40×42×8(座骨部:7.5)	790	00149-000065	4560232693792 4560232693785
FC-コキュー君 NV用 替えカバー	もも着脱タイプ	ブルー/グリーン	¥4,180	—	—	—	—
	フラットタイプ	ブルー/グリーン	¥4,180	—	—	—	—

●FC-フィット(背)

品名	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAISコード	JANコード
FC-フィット(背) (ベース部+ロングパット2個)	¥16,500	40×22×23	525	00149-000023	4560232693921
ロングパット (2個1セット)	¥10,560	14×16.5×23	180×2	—	4560232693938

●FC-フィット(腰)

品名	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAISコード	JANコード
FC-フィット(腰)	¥8,360	41×16.5×20	450	00149-000022	4560232693945
FC-フィット(腰) 用替えカバー (防水)	¥4,950	—	—	—	—

●エルダークッション

品名	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAISコード	JANコード
エルダークッション	¥11,550	40×41×7.8(座骨部:6)	930	00149-000020	4560232693914
エルダークッション用 替えカバー	¥4,510	—	—	—	—

●ゲルファースト

品名	色	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAISコード	JANコード	
ゲルファースト	防水カバータイプ	ブラック	¥18,700	40×40×6	950	00149-000021	4560232693877
	通気カバータイプ	ブルー グリーン	¥17,600	40×40×6	950	00149-000021	4560232693839 4560232693815
ゲルファースト用 替えカバー	防水カバータイプ	ブルー/グリーン	¥4,510	—	—	—	—
	通気カバータイプ	ブルー/グリーン	¥4,180	—	—	—	—

●FC-アジャスト

品名	色	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAISコード	JANコード
FC-アジャスト フルセット (背クッションフルタイプ+座クッション)	ブルー	¥41,800	—	2,110	00149-000007	4560232693211
	グリーン	—	—	—	—	4560232693228
FC-アジャスト 標準セット (背クッション標準タイプ+座クッション)	ブルー	¥35,200	—	1,970	00149-000008	4560232693112
	グリーン	—	—	—	—	4560232693129
FC-アジャスト 背クッション フルタイプ (背ソフトクッション+サイドパット2個+骨盤パット2個)	ブルー	¥24,200	50×44×13.5	830	00149-000026	4560232693419
	グリーン	—	—	—	—	4560232693426
FC-アジャスト 背クッション 標準タイプ (背ソフトクッション+サイドパット2個)	ブルー	¥17,600	50×44×13.5	690	00149-000027	4560232693518
	グリーン	—	—	—	—	4560232693525
FC-アジャスト 座クッション	ブルー グリーン	¥22,550	40×40×8.5(座骨部:5)	1,280	00149-000028	4560232693310 4560232693327
背ソフトクッション (背板付)	ブルー/グリーン	¥9,834	50×44×2.5	520	—	—
サイドパット (2個1セット)	ブルー/グリーン	¥9,350	14×20×11	85×2	—	—
骨盤パット (2個1セット)	ブルー/グリーン	¥9,350	14×15×11	70×2	—	—

●FC-ファイン

品名	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAISコード	JANコード	
FC-ファイン 背クッション	ロングタイプ	¥14,960	36~44×40×13	520	00149-000057	4560232692412
	ショートタイプ	¥9,460	36~44×21×13	320	00149-000056	4560232692429
FC-ファイン 背クッション用 替えカバー	ロングタイプ	¥6,050	—	—	—	—
	ショートタイプ	¥4,620	—	—	—	—
FC-ファイン 背クッション ロングタイプ用固定ベルト	¥880	—	—	—	—	
FC-ファイン 座クッション	ハイタイプ	¥9,460	40×41×7.5	945	00149-000059	4560232692436
	ロータイプ	¥9,020	40×41×6	795	00149-000058	4560232692443
FC-ファイン 座クッション用 替えカバー	ハイタイプ	¥4,070	—	—	—	—
	ロータイプ	¥4,070	—	—	—	—

メンテナンスについて【車いすクッション】

[表示内容について] ◎ 最も適している ○ 適している × 不可

種類	部品	洗濯			洗剤・薬剤					消毒			耐熱温度	取扱い上の注意
		手洗い	洗濯機	乾燥機	中性洗剤	弱アルカリ性洗剤	塩素系漂白剤	エタノール	逆性石鹼 (オスバン液)	熱湯消毒	オゾン消毒	オートクレーブ		
FC-コキュー君 NV 	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 ・清拭のみ
	ももパット	◎	◎	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・面ファスナーで傷つけないよう個々に手洗い ・脱水後、日陰乾燥
FC-フィット(背) 	本体	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、日陰乾燥
	ロングパット	◎	◎	○	○	○	○	○	○	×	○	×	100℃以下 30分以内	・脱水後、日陰乾燥
FC-フィット(腰) 	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 ・清拭のみ
	カバー	◎	◎	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥
エルダークッション 	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 ・清拭のみ
	防水カバー	◎	◎	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥
ゲルファースト 	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 ・清拭のみ
	通気カバー	◎	◎	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥
FC-アジャスト 	カバー	◎	◎	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・背ソフトクッションは、 背板を抜いてから洗浄 ・脱水後、日陰乾燥
	本体	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、日陰乾燥
FC-ファイン 	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 ・清拭のみ
	カバー	◎	◎	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	※タンブラー乾燥は不可。
FC-アジャスト 座クッション	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可。 ・清拭のみ
	カバー	◎	◎	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥

ホームページにて資料の閲覧・ダウンロードができます。
下記のQRコードよりアクセスしてください。

カタログ



取扱説明書



メンテナンス表



製品動画

