

排泄ケア用スタンディングリフト

SKYLIFT*iR*

スカイリフト iR SL-2023

介護保険：福祉用具貸与（移動用リフト）




もっと使いやすく、よりコンパクトにリニューアル

Point ①

狭い場所でも小回りが きくコンパクト設計


車いすと同程度のコンパクトさ。車いすで移動ができるスペースがあれば、狭いトイレ内でも介助空間が確保できます。

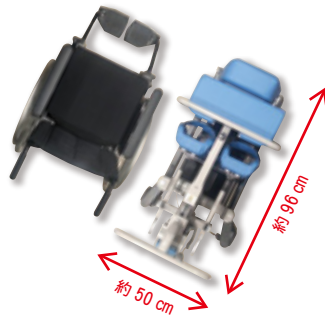

Point ②

操作性や耐久性に優れた 双輪キャスターを採用


床面の影響を受けにくい双輪キャスターで、負担なく軽い力で押し引き操作が行えます。

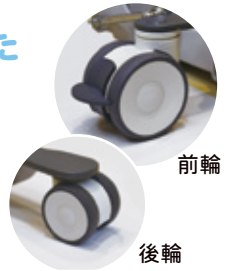

Point ③

電動式開閉脚でアクセシビリティがさらに向上

- 脚部が大きく開くので、電動車いすやシャワーキャリーにもストレスなくアクセスできます。
- 後輪キャスターの高さを 63 mm まで低くし、低床ベッドにも対応できるようになりました。

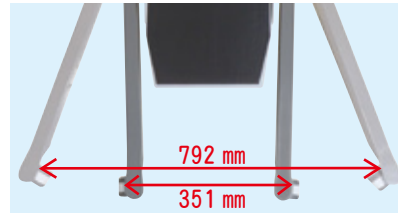

車いすへの移乗



洋式便器への移乗



シャワーキャリーへの移乗



立位訓練



3つの安全・安心設計



① 挟み込みを防止「停止センサー」

胸パット下端にセンサーを内蔵。接触を検知すると自動で下降を停止、挟み込みを防止します。



② バッテリーの消費を防ぐ「自動電源オフ」

電源が入っていても、20分間作動がなければ自動で電源が切れます。電源の切り忘れによるバッテリーの消費を防ぎます。

③ 安全に下降できる「緊急下降ボタン」


故障等でご利用者様が乗った状態で下降しなくなった際、安全に下降できます。停止センサー作動時はボタンの照明が点滅します。(誤操作防止カバー付)



適合条件

[ベッド等]

脚部高

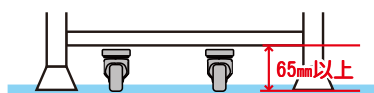


高さ 65mm以上


ベッド下を計測する場合、フレームのたわみ等に留意して、利用者がベッドに座った状態で計測してください。

[車いす・洋式便器・シャワーキャリー・電動車いす等]

脚部幅 (閉脚時)

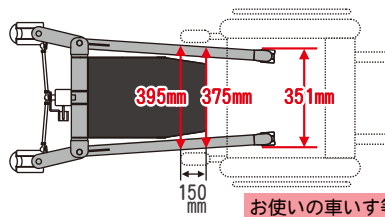

脚部幅 (開脚時)

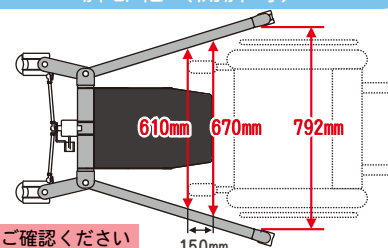

お使いの車いす等の足回りをご確認ください

身長 / 体重 145~180cm / 100kg未滿


身体機能

- ・自力または一部介助でベッドで端座位が可能な方
- ・立ち座りに必要な下肢関節の可動域が保たれている方
- ・下肢のまひ (片まひ、両下肢まひ、四肢まひ) や拘縮があっても下肢に荷重をかけることが可能な方


留意事項

- ・重度の関節拘縮がある方や、全く力の入らない弛緩性まひの方は、適応しない場合があります。
- ・起立性低血圧や重度の骨粗鬆症、変形性関節症のある方は主治医や看護師にご相談の上、ご使用ください。
- ・ご使用に際して不安のある時は、事前に立位をとることに支障はないか主治医や担当のPT・OTにご確認ください。

[SIDE]

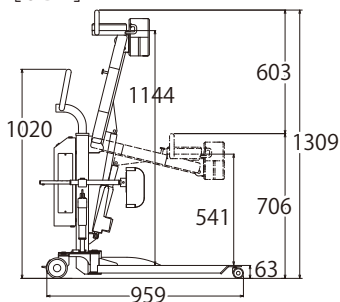

[TOP]

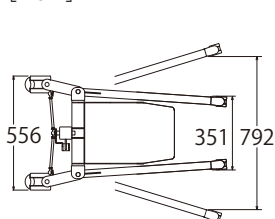

品名	品番	サイズ	価格	重量	TAISコード	JANコード
スカイリフト iR	SL-2023	—	¥680,000 (非課税)	43kg	00149-000066	4560232694539
エアスリング	AS-201	M	¥37,000 (税込 ¥40,700)	—	00149-000002	4560232694126
		L	—	—	00149-000002	4560232694164
脚ベルト付エアスリング	—	M	¥45,000 (税込 ¥49,500)	—	00149-000054	4560232694201
		L	—	—	00149-000054	4560232694225
サポートスリング	SS-202	M	¥34,000 (税込 ¥37,400)	—	00149-000003	4560232694133
		L	—	—	00149-000003	4560232694171
トイレットスリング	TS-204	—	¥34,000 (税込 ¥37,400)	—	00149-000052	4560232694157
スムーズホルダー	SH-203	—	¥19,500 (税込 ¥21,450)	—	00149-000025	4560232694140

アイ・ソネックス株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7

TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

<https://www.nasent.net> ナーセント 検索

