


ゲル・ファースト

取扱説明書

ご使用方法

ゲル部(凹凸のある部分)を後ろにして座って下さい。逆にすると性能が低下します。

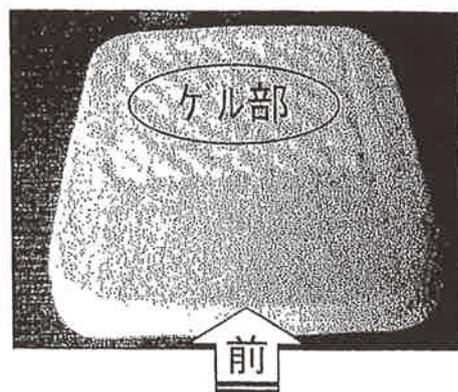

注意事項

- クッションの中に水などの液体を入れないで下さい。
- クッションの上に急激な衝撃を与えないで下さい。フィルムが破損する場合があります。
- ストーブ等の火の近くに置かないで下さい。
- クッション表面が汚れた場合、水または中性洗剤で拭き取って下さい。

仕様

クッション材 : ウレタンフォーム、ウレタンゲル
クッション皮膜 : ウレタンフィルム

製造元 ことぶき株式会社

〒444-3524

愛知県岡崎市竜泉寺町塘ヶ入41

TEL 0564-52-6821


FAX 0564-51-8250

内蔵ゲルでずれの力を吸収！

ゲルファースト

取扱説明書

このたびは、ゲルファーストをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」には、ゲルファーストを正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。

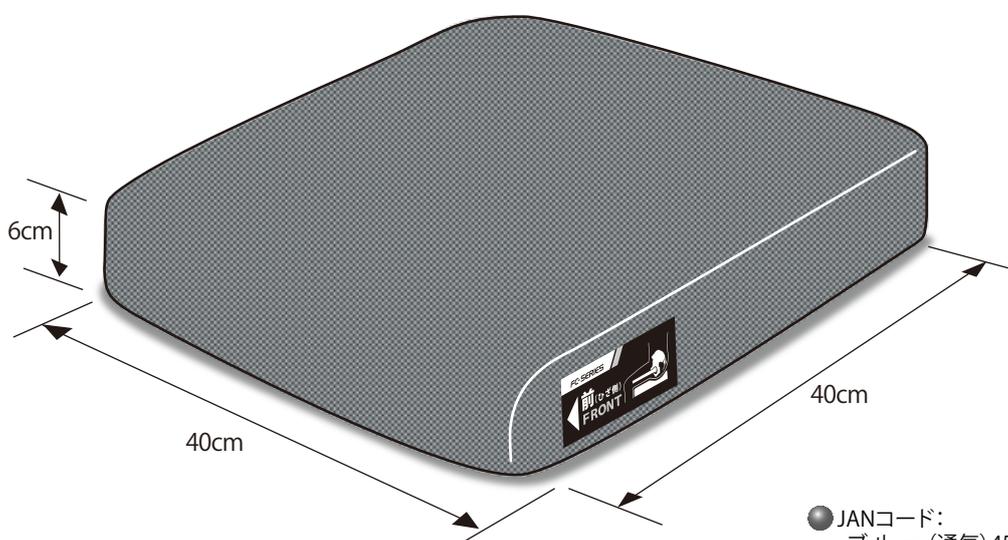

- JANコード:
ブルー (通気) 4560232693839
グリーン (通気) 4560232693815
ブラック (防水) 4560232693877
- TAISコード: 00149-000021


- 正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずお読みください。
- 必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。
- 必ず専門家と相談の上、正しくご使用ください。
- 使用中に異常を感じたり、不安を感じた場合には使用を中止し、専門家にご相談ください。

● 使用上の注意

- 床ずれができていたりできやすい方が初めてご使用になる場合は、医師や看護師、PT、OTなどの専門家にご相談ください。
- 自動車の座席に乗せて使用しないでください。
- 使用には必ず外カバーを付けてご使用ください。
- カバー開口部のファスナーを開けたまま使用しないでください。
- 火のそばに近づけないでください。


●使用方法

<車いすへの設置方法>

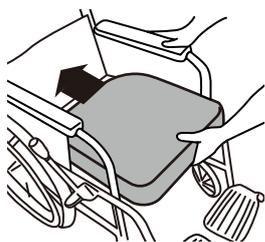


カバーのタグに表示されている「前 (FRONT)」、「後 (BACK)」を確認の上、向きを合わせて車いすシートの奥までしっかり差し込んでください。

<カバー>

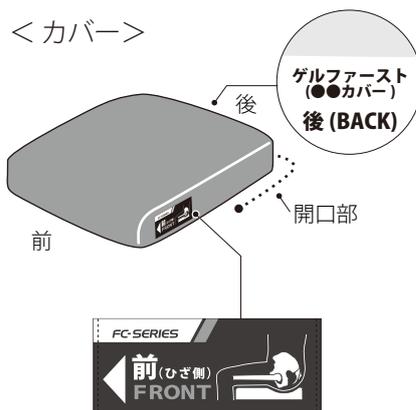

<クッション>

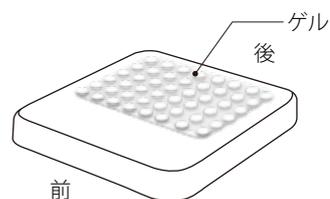


洗濯等でカバーを掛け直す時は、カバーとクッション本体の向きを合わせてから、装着してください。

●仕様

サイズ/重量:幅40×奥行40×高さ6cm/950g(本体+カバー)

材質:《防水カバー》表生地:ポリエステル100%
(裏面ウレタンフィルムラミネート加工)
裏生地:ナイロン100%(ウレタン樹脂塗布加工)

《通気カバー》表生地:ポリエステル100%
裏生地:ナイロン100%(ウレタン樹脂塗布加工)

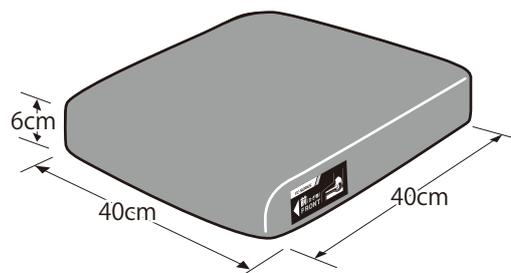

●カバーの手入れ方法

洗 浄

- 外カバーは、クッションを取り外して洗濯ネットに入れ、洗濯機の弱流で中性洗剤を使用して洗ってください。乾燥機のご使用も可能ですが、日陰での自然乾燥をおすすめします。

消 毒

- 外カバーは逆性石鹼(オスバン液)での消毒、オゾン消毒が可能です。
- 塩素系漂白剤はご使用になれません。

保 管

- 汚れを取り除いてから、よく乾燥させて保管してください。
- 高温、多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。変形や変色の原因となります。
- 重量物を乗せた状態で保管しないでください。へたりや変形の原因となります。

販売元:  **アイソネックス**株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並 100-7
ホームページ <https://www.nasent.net>

TEL: 086-200-1550 FAX: 086-200-1553