

●手入れの方法

洗 浄

<カ バー>

- クッションを取外し、洗濯ネットに入れ、洗濯機の弱流で中性洗剤を使用して洗濯してください。乾燥機のご使用も可能ですが、日陰での自然乾燥をお勧めします。

<ももパット>

- 一つずつ中性洗剤で、軽く押し洗いしてください。同時に洗うと、面ファスナーが他のももパットを傷つける恐れがあります。また、押し洗いする際、丸めたり折り曲げたりしないでください。破損の原因になります。
- タオルなどで水分を拭きとった後、自然乾燥してください。
- 洗濯機・乾燥機はご使用になれません。

<クッション>

- ももパットを取り外して、水または中性洗剤で清拭してください。その際、エアバルブから、水や中性洗剤が入らないようにして下さい。
- 洗濯機・乾燥機はご使用になれません。

消 毒

<カ バー>

- 逆性石鹼（オスバン液）での消毒、オゾン消毒が可能です。
- 塩素系漂白剤は使用できません。

<ももパット>

- 逆性石鹼（オスバン液）での消毒、オゾン消毒が可能です。
- 塩素系漂白剤は使用できません。

<クッション>

- 逆性石鹼（オスバン液）での消毒、オゾン消毒が可能です。逆性石鹼を使用する場合、清拭のみで漬け置きはしないでください。
- 塩素系漂白剤は使用できません。

保 管

- 汚れを取り除いてから、よく乾燥させて保管してください。
- 高温、多湿、直射日光の当たる場所では保管しないでください。変形や変色の原因となります。
- 重量物を乗せた状態で保管しないでください。ヘタリや変形の原因となります。

製造元：ことぶき株式会社

本 社 / 〒444-3524 愛知県岡崎市竜泉寺町塘ヶ入 41

販売元：アイ・ソネックス株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並 100-7 TEL：086-200-1550 FAX：086-200-1553
ホームページ <https://www.nasent.net>

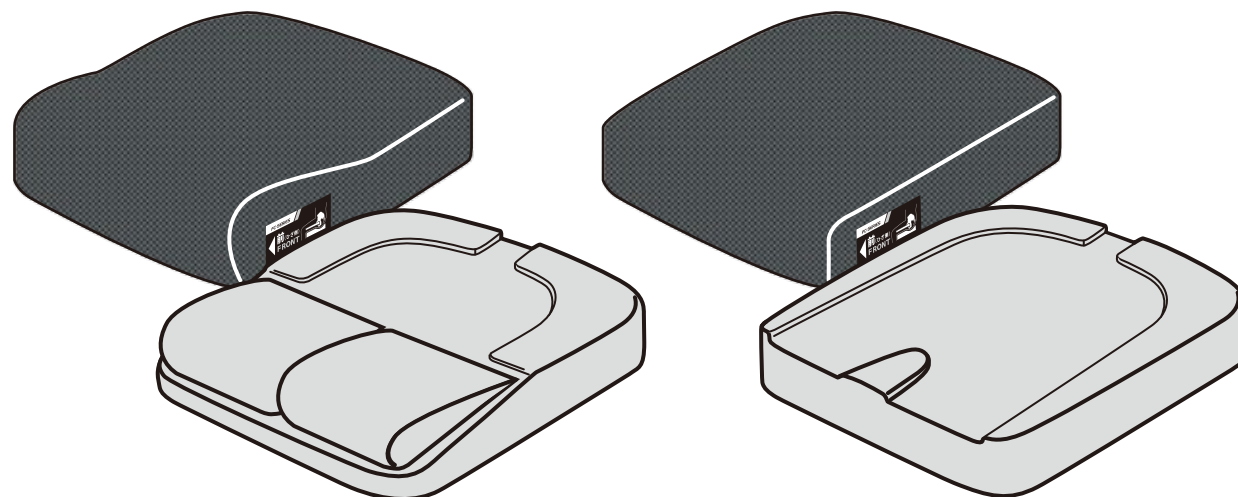
品質向上のため、お断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

自動調圧エアバルブ付 車いすクッション

FC-コキュー君NV

取扱説明書

このたびは、FC-コキュー君 NV をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」には、FC-コキュー君NV を正しく安全にお使いいただくための注意事項を記載しています。



●もも着脱タイプ

40cm 幅（通気）
TAIS コード：00149-000064

●フラットタイプ

40cm 幅（通気）TAIS コード：00149-000065
38cm 幅（通気）TAIS コード：00149-000069

- 正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずよくお読みください。
- 必要なときに読めるように大切に保管してください。
- 床ずれができていたり、できやすい方がご使用になる場合は、医師や看護師、PT、OT などの必ず専門家と相談の上、正しくご使用ください。
- 使用中に異常を感じたり不安を感じた場合には、使用を中止し専門家に相談ください。

アイ・ソネックス株式会社

●使用上の注意

バルブの上にお尻がかからないように座ってください。ケガをする恐れがあります。

クッションの前後を逆さまに置いたり、カバーを掛けるときに向きを間違えないでください。

必ずカバーをしてご使用ください。また、開口部のファスナーを開けたまま使用しないでください。

火気や鋭利なものは近付けないでください。破損の原因となります。

クッション内部に水などの液体、または、空気以外の気体を入れないでください。

保管する場合には紫外線による劣化を防ぐため、直射日光の当たる場所は避けてください。

洗浄や保管をする場合は、取扱説明書や品質表示タグの説明に従ってください。

●特長と名称

① もも着脱タイプ

＜カバー＞

FC コキュー君 NV もも着脱タイプ 40cm 幅 (通気) 後 (BACK)

前 後 開口部

FC-SERIES 前 (ひざ側) FRONT

＜クッション＞

ももパット 後

NVバルブ

バルブホルダー

② フラットタイプ

＜カバー＞

FC コキュー君 NV フラットタイプ 40cm 幅 (通気) 後 (BACK)

前 後 開口部

FC-SERIES 前 (ひざ側) FRONT

＜クッション＞

後

NVバルブ

バルブホルダー

「前」／「後」表示

カバー側面に「前 (FRONT)」、後側に「後 (BACK)」の表示をしています。洗濯等でのカバーのかけ間違いや、置き間違いによる誤用を防ぎます。
※カバー開口部(ファスナー) もも着脱タイプ・・・前開き フラットタイプ・・・後開き

NVバルブ

吸排気一体型の自動調圧バルブです。座るだけで最適な内圧になります。どすん座りをした際に空気を一挙排出するリリース機能付で衝撃や破損を軽減します。

ももパット (もも着脱タイプのみ)

面ファスナーで、片側ずつ取り外すことができます。取り外すと前座部の高さが3cmまで低くなり、股関節の屈曲を浅くすることができます。

●使用方法

ご使用の前に、バルブが正しくはめ込まれているかを確認してください。

＜確認事項＞

- ・奥までしっかり差し込まれている
- ・縁が折れ曲がらず、真直ぐ装着されている

折れ曲がり

＜車いすへの設置方法＞

カバーのタグに表示されている「前」、「後」を確認の上、向きを合わせて車いすシートの奥までしっかり差し込んでください。

＜ももパットについて (もも着脱タイプのみ) ＞

ももパットを取り外すと、前座が3cmまで低くなります。状態に合わせて取り外して下さい。

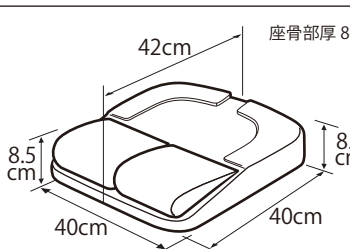
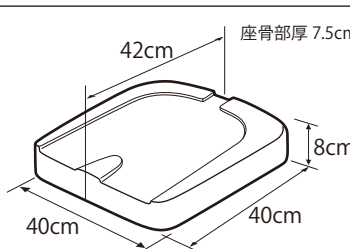
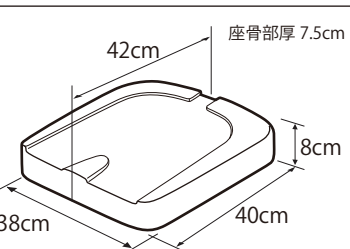
●ももパットを両側外す

関節リウマチの方など

●ももパットを片側外す

片足こぎや大腿骨頸部骨折後など

●仕 様

	もも着脱タイプ		フラットタイプ			
	40cm 幅 (通気)		40cm 幅 (通気)		38cm 幅 (通気)	
	ブルー	グリーン	ブルー	グリーン	ブルー	グリーン
品 番	FCNV-M-B	FCNV-M-G	FCNV-F-B	FCNV-F-G	FCNV-F38-B	FCNV-F38-G
JANコード	4560232693761	4560232693754	4560232693792	4560232693785	4560232693891	4560232693884
TAISコード	00149-000064		00149-000065		00149-000069	
重 量	820g (カバー含む)		790g (カバー含む)		740g (カバー含む)	
適合車いす	シート幅40～45cm		シート幅40～45cm		シート幅38～40cm未満	
サ イ ズ						
材 質	《通気カバー》表生地:ポリエステル100%、裏生地:ナイロン100% (ウレタン樹脂塗布) 《クッション》本体:ウレタン複合材、被膜:ウレタン樹脂フィルム 《N Vバルブ》硬質PVC、NBR (ニトリルゴム) ●もも着脱タイプのみ 《ももパット》中材:ウレタンフォーム、被膜(表):ウレタン樹脂フィルム、被膜(裏):ポリエステル					