

FC-コキュ-君NV

介護保険：福祉用具貸与（車いす付属品）

防水カバー
新登場！



もも着脱タイプ
40 cm幅（通気） / （防水）



フラットタイプ
40 cm幅（通気） / （防水）
38 cm幅（通気） / （防水）




床ずれ対策にベスト！目玉バルブの自動調圧エアクッション

Point①

コンビネーションバルブで吸排気を自動コントロール

座ると自動的に空気を排気してお尻の形にフィット、立ち上がると素早く元の形状に復元、座るたびに最適な座り心地を得られます。

体動に合わせてエアを素早く吸排気するので、長時間座っても疲れにくいクッションです。

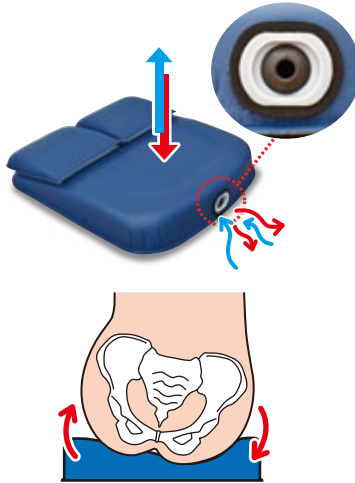

Point②

バルブのリリース機能でどすん！と座っても安心

勢いよく座った時にはエアを一気に排出。着座時の衝撃や痛みを緩和し、急激な内圧上昇によるパンクも防ぎます。


▼エアを一気に排出する「リリース機能」



Point③

ひとつのバルブで幅広い対象者をカバー

体重 35 ~ 85kg の対象者に適応

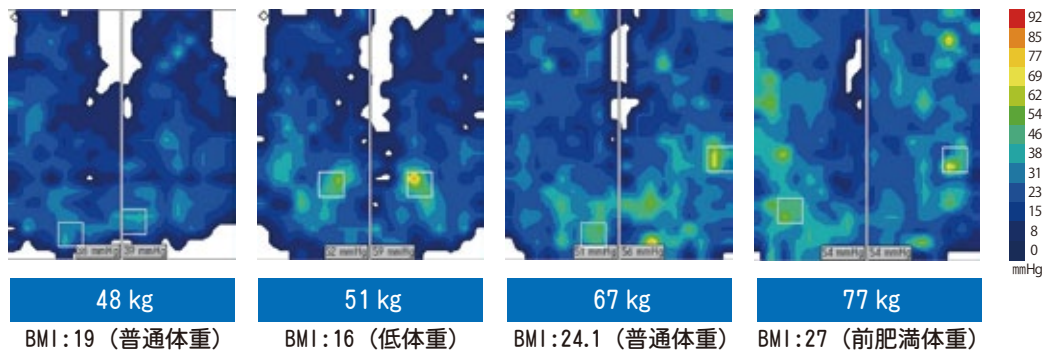


耐久性に優れた防水被膜でお手入れ簡単

クッション本体は、裏も表も耐久性と伸縮性に優れたウレタンフィルムを採用。汚れても清拭でキレイになるので、お手入れが簡単です。




前後の置き間違いを防ぐ表示付カバー

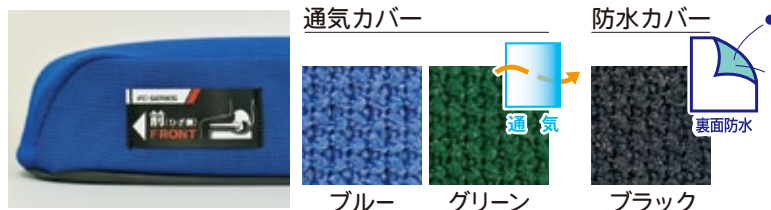

エアとウレタンのハイブリッド構造、 体圧分散+姿勢保持を両立

エアの体圧分散性と、ウレタンの姿勢保持性によって、床ずれを防止しながら、座位姿勢の安定性を高めます。

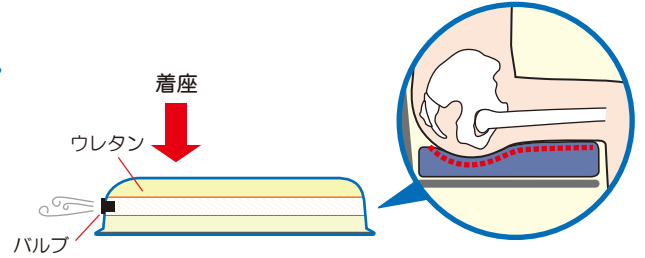

足こぎ対応！もも着脱タイプ

体圧分散性を高める
コンター層

エアを吸排気する
エア層

姿勢を安定させる
底つき防止層

仙骨を除圧

前滑りを防止

骨盤後傾を防止

ももパット

片側ずつ取り外しが可能
取り外すと前座部の厚みが3 cmに

乗り降りしやすい！フラットタイプ

体圧分散性を高める
コンター層

エアを吸排気する
エア層

姿勢を安定させる
底つき防止層

仙骨を除圧

内転防止パッド

サイドサポート

両下肢の内転を防止
自然な座位姿勢に

両サイドから骨盤を
安定的に保持

対象者

足こぎ対応 圧分散性 前すべり 姿勢が不安定 お尻が痛い


- 座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- 姿勢の安定や前滑りを防止したい方
- 片麻痺で足駆動をさせる方
- 股関節を深く屈曲できない方(大腿骨頸部骨折後、関節リウマチなど)

対象者

乗り降りしやすい 圧分散性 前すべり 姿勢が不安定 お尻が痛い


- 座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- 失禁や失便が多く、汚れが気になる方
- 長時間車いすに座って過ごされる方
- 車いすに乗り降りしやすいクッションが欲しい方

●もも着脱タイプ 40cm 幅

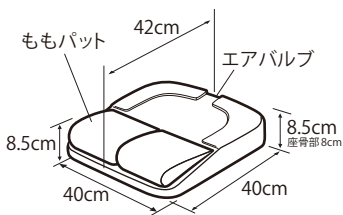

●フラットタイプ

① 38cm 幅 ② 40cm 幅

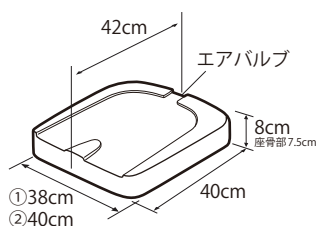

FC- コキュー君 NV		色	品番	価格	重量	TAISコード	JANコード
もも着脱タイプ	40cm 幅 (通気)	ブルー	FCNV-M-B	¥ 35,200	820g	00149-000064	4560232693761
		グリーン	FCNV-M-G				4560232693754
	40cm 幅 (防水)	ブラック	FCNV-M-BK	¥ 37,400	820g	00149-000076	4560232693747
フラットタイプ	40cm 幅 (通気)	ブルー	FCNV-F-B	¥ 30,800	790g	00149-000065	4560232693792
		グリーン	FCNV-F-G				4560232693785
	40cm 幅 (防水)	ブラック	FCNV-F-BK	¥ 33,000	790g	00149-000067	4560232693778
	38cm 幅 (通気)	ブルー	FCNV-F38-B	¥ 30,800	740g	00149-000069	4560232693891
		グリーン	FCNV-F38-G				4560232693884
	38cm 幅 (防水)	ブラック	FCNV-F38-BK	¥ 33,000	740g	00149-000068	4560232693808
材	〈通気カバー〉表生地: ポリエステル、裏生地: ナイロン(ウレタン樹脂塗布)						
質	〈防水カバー〉表生地: ポリエステル(裏面ウレタンフィルムラミネート加工)、裏生地: ナイロン(ウレタン樹脂塗布)						
	〈クッション〉ウレタン樹脂フィルム、ウレタン複合材 (パルプ) 硬質PVC、ニトリルゴム						



〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7
TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

<https://www.nasent.net> ナーセント 検索

